

Programat® P500 & P500/G2

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V8.1 25.08.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programmstruktur • Diverse neue Programme (z.B. IPS e.max Ceram) 	Aktuelle, ausgelieferte Version
V8.0 01.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS Style und IPS Ivocolor 	Nicht mehr erhältlich!
V7.1 01.10.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS InLine Pulver Opaquer • Diverse Software Optimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V7.0 05.05.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Service-Intervallanzeige • Diverse Software Optimierungen • Neues, spezielles Speed-Kristallisationsprogramm für IPS e.max CAD (P85): Das neue Programm ersetzt das bestehende IPS e.max CAD Speed Kristallisationsprogramm. Das Programm darf nur in Verbindung mit dem speziell dafür vorgesehenen IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray (Artikelnr. 647633AN) verwendet werden. Die Hinweise zur Durchführung der IPS e.max CAD Speed Kristallisation sind zu beachten. 	Nicht mehr erhältlich!
V6.0 04.04.2011	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126) • Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 83 – 84) 	Nicht mehr erhältlich!
V5.0 15.04.2010	Neue Software P500/G2: Software optimiert und neue Features <ul style="list-style-type: none"> • Neue Icons und optimierte Benutzeroberfläche • Power Saving Technology • TSP: Thermo Shock Protection • CSP: Cooling Shock Protection • Neue Programmstruktur: Ivoclar Vivadent und individuelle Programme • Brennparameter in den Ivoclar Vivadent Programmen wurden geändert 	Nicht mehr erhältlich!

Programat® P500 & P500/G2

V3.1 15.01.2008	Software optimiert und neue Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Aktualisierte Ivoclar Standard-Brennprogramme P1-P120 • Neu SW-Update via USB Memory-Stick möglich • Neue Funktion: Memory-Stick als externer Programmspeicher vorbereiten 	Nicht mehr erhältlich!
V2.2 05.02.2007	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Parameter in den Programmen (P23 und P24) 	Nicht mehr erhältlich!
V2.0 14.06.2006	Software optimiert und neue Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Neue Darstellung von Gruppen- und Programmnamen • Info-Zeile zum aktuellen Programmstatus • Erweiterte Informationen in der Fusszeile • Neue Sonderzeichen und neue Schreibfunktionen • Verbesserte Wiedergabe von Sound • Neue Error-Beschreibung • Verbesserte Memory-Stick Erkennung 	Nicht mehr erhältlich!
V1.6 23.02.2006	Software optimiert und neue Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Editieren von Zahlenwerten mit +/- Tasten wird bei längerem Drücken schneller • Anpassung der Parameter in den Programmen (P15 und P16) 	Nicht mehr erhältlich!
V1.5 23.12.2005	Software optimiert	Nicht mehr erhältlich!
V1.03 16.11.2005	Software optimiert	Nicht mehr erhältlich!
V1.02 20.10.2005	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Touch-Funktion verbessert 	Nicht mehr erhältlich!
V1.01 13.10.2005	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Brennparameter wurden geändert 	Nicht mehr erhältlich!
V1.00 22.09.2005	Grundversion	gesperrt

Version 25.08.2017