


Multilink® Automix


Befestigung von Glaskeramikrestorationen (Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Wurzelstifte)

Restauration

Vorbereitung von Keramikrestorationen:
Gemäss Herstellerangaben.
z.B. IPS Empress: 60 s ätzen
IPS e.max CAD/Press: 20 s ätzen
mit IPS Ceramic-Ätzgel (Flusssäure).
Sicherheitsvorschriften beachten.

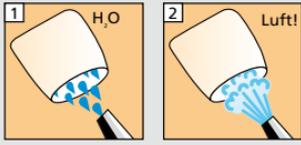




Monobond Plus

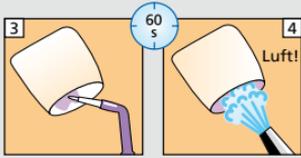







Dentin/Schmelz





Multilink Primer
A+B 1:1 mischen

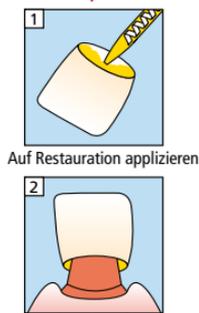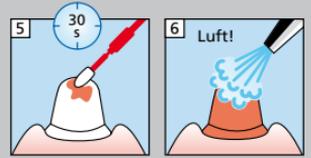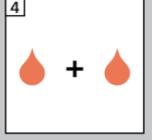

Restauration fixieren

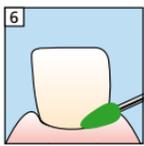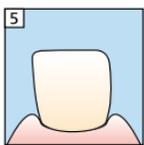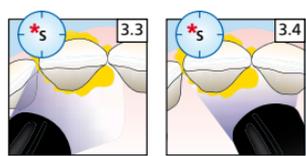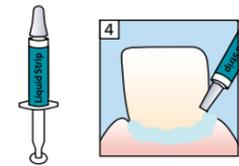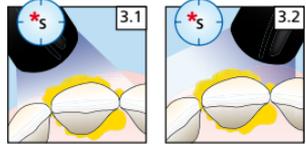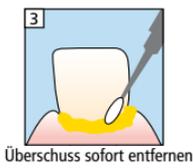

* Lichtintensität	Belichtungszeit pro Viertelseite	
Indikation bis 2 Brückenpfeiler = 3-4 gliedrige Brücke		
ca. 650 mW/cm ²	3 s	z.B. Bluephase im LOW POWER-Modus
ca. 1.000 mW/cm ²	1-2 s	z.B. Bluephase Style oder Bluephase im HIGH POWER-Modus
Indikation bis 6 Brückenpfeiler = zirkuläre Brücke		
ca. 650 mW/cm ²	1 s	z.B. Bluephase im LOW POWER-Modus

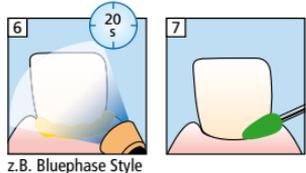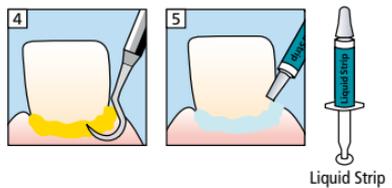

CE 0123



mehr Informationen unter
www.cementation-navigation.com



Gebrauchsinformation
beachten

ivoclar
vivadent
clinical