



# IPS d.SIGN® – Schichtschema


Chromascop – idealer Platzbedarf

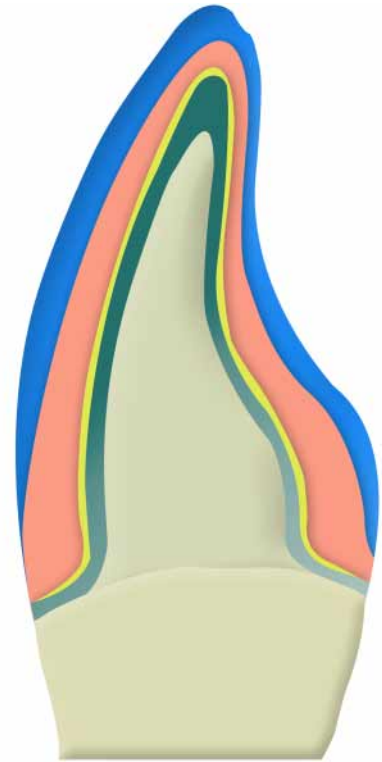



Chromascop – geringer Platzbedarf

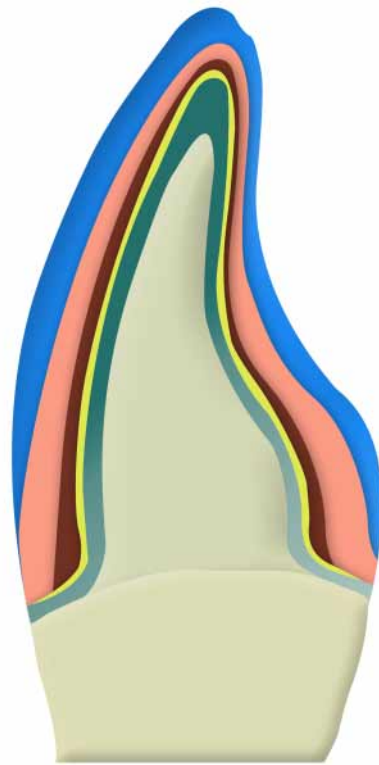


A-D – idealer Platzbedarf

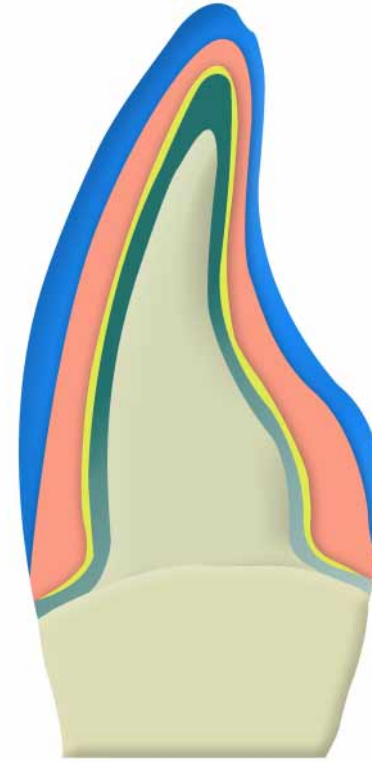

A-D – geringer Platzbedarf

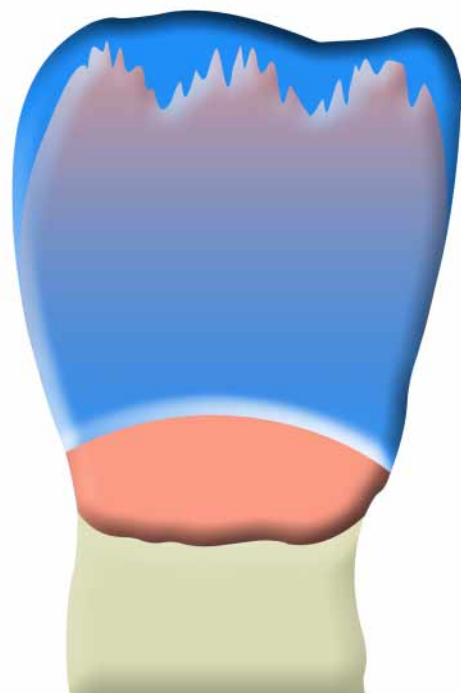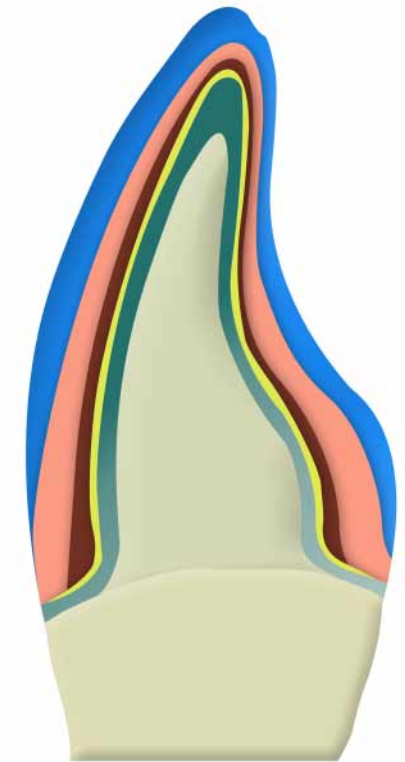

|                    | Idealer Platzbedarf | Geringer Platzbedarf |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Gerüst</b>      | 0.3 mm              | 0.3 mm               |
| <b>Opaquer</b>     | 0.1 mm              | 0.1 mm               |
| <b>Deep Dentin</b> |                     |                      |
| zervikal           | –                   | 0.3 mm               |
| inzisal            | –                   | 0.1 mm               |
| <b>Dentin</b>      |                     |                      |
| zervikal           | 1.0 mm              | 0.5 mm               |
| inzisal            | 0.7 mm              | 0.3 mm               |
| <b>Schneide</b>    |                     |                      |
| zervikal           | 0.2 mm              | 0.1 mm               |
| inzisal            | 0.5 mm              | 0.4 mm               |

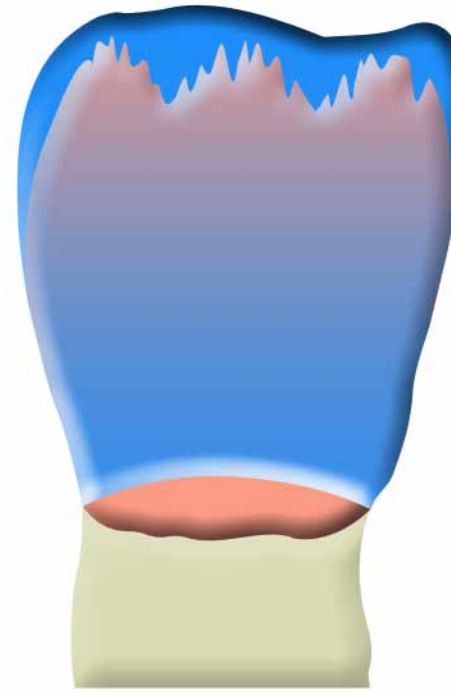

|                    | Idealer Platzbedarf | Geringer Platzbedarf |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Gerüst</b>      | 0.3 mm              | 0.3 mm               |
| <b>Opaquer</b>     | 0.1 mm              | 0.1 mm               |
| <b>Deep Dentin</b> |                     |                      |
| zervikal           | –                   | 0.3 mm               |
| inzisal            | –                   | 0.1 mm               |
| <b>Dentin</b>      |                     |                      |
| zervikal           | 0.9 mm              | 0.5 mm               |
| inzisal            | 0.7 mm              | 0.3 mm               |
| <b>Schneide</b>    |                     |                      |
| zervikal           | 0.2 mm              | 0.1 mm               |
| inzisal            | 0.5 mm              | 0.4 mm               |

Bei der Chromascop Schichtung reicht die Schneide bis zum Beginn des zervikalen Drittels. Bei den neben stehenden Angaben handelt es sich um Richtwerte.

Bei der A-D Schichtung reicht die Schneide bis in die Mitte des zervikalen Drittels. Bei den neben stehenden Angaben handelt es sich um Richtwerte.