

IPS e.max® Press Multi Prozessübersicht

all ceramic
all you need

Modellation, anwachsen an Muffelbasis




Vollanatomische Modellation



Restauration am IPS Multi Wax Pattern
anwachsen



IPS Multi Muffelbasis mit angewachsenen
Restaurationen

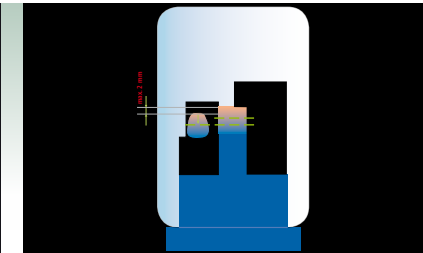

Optional: Erhöhung Inzisalanteil

Einbetten, Pressen



Einbetten



IPS e.max Press Multi, IPS Multi One-
Way-Plunger




Patentiertes „horizontales Pressen“



Pressen mit Spezialprogramm z.B. mit
Programat® EP 5010

Ausbetten, Glanzbrand, ... fertig

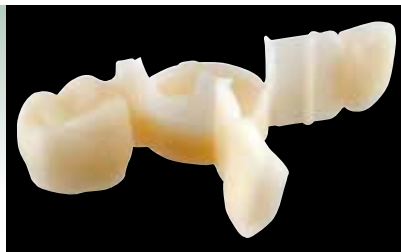

IPS e.max Press Multi nach dem Ausbetten



Malfarben-/Glanzbrand mit
IPS e.max Ceram



Farbübereinstimmung mit A-D-
Farbschlüssel




Fertige IPS e.max Press Multi-Restauration


IPS e.max® Press Multi Anwachsregeln

all ceramic
all you need

Grundsätzliche Hinweise zum Anwachsen des IPS Multi Wax Pattern

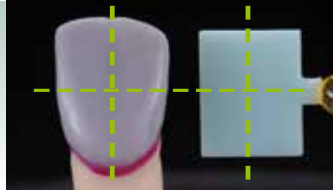

Modellation mittig zum IPS Multi Wax Pattern positionieren.

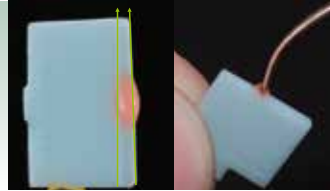

IPS Multi Wax Pattern mit der schmalen, konischen Seite nach okklusal/inzisal ausrichten.



IPS Multi Wax Pattern zur Vestibulärfläche hin ausrichten



Spalt zwischen Modellation und Wax Pattern mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht.

Anwachsen Frontzahn



IPS Multi Wax Pattern Form A in „Verlängerung“ der Labialfläche an die Modellation anwachsen.



Spalt mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht. Falls notwendig, basale Ecke am Wax Pattern runden.

Anwachsen Frontzahn mit filigranem Stumpf



IPS Multi Wax Pattern Form B in „Verlängerung“ der Labialfläche an die Modellation anwachsen.



Spalt mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht.

Anwachsen Veneer



IPS Multi Wax Pattern Form A in „Verlängerung“ der Labialfläche an der Modellation positionieren. Präparationsrand beachten.




Spalt mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht. Falls notwendig, basale Ecke am Wax Pattern runden.



Das Veneer nicht von labial anwachsen.

Anwachsen Seitenzahn

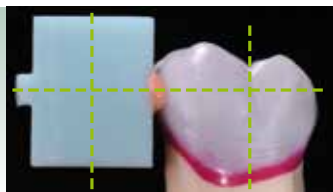

IPS Multi Wax Pattern Form A vertikal mittig an der Restauration fixieren. Verjüngung des Wax Pattern nach okklusal.



Für einen natürlichen Farbverlauf der bukkalen Fläche das IPS Multi Wax Pattern Form A an der mesio-bukkalen Seite ansetzen.



Spalt mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht. Falls notwendig, basale Ecke am Wax Pattern runden.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation IPS e.max Press Monolithic Solutions

