


# Variolink® Esthetic DC


## Eingliederung von Inlays (Glaskeramik, z. B. IPS e.max®)

### Einprobe

Variolink Esthetic Try-In

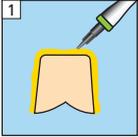


Auftragen der Try-In Paste

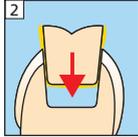


Einprobe der Restauration







Reinigung nach der Einprobe

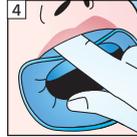

Trockenlegung

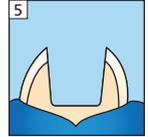

### Restauration

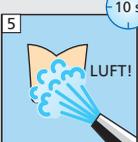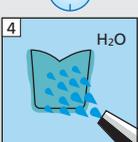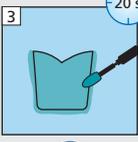
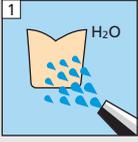


Monobond Etch & Prime








### Befestigung

Variolink Esthetic DC



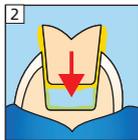
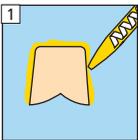


Bluephase Style

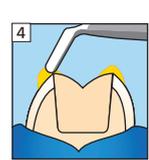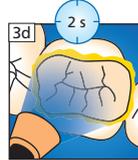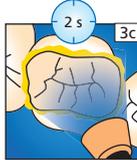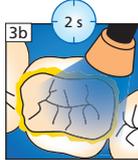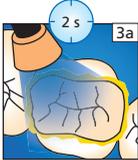

Restauration bis zum Ende der abschließenden Polymerisation fixieren


Liquid Strip

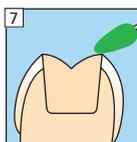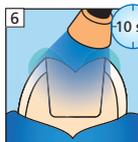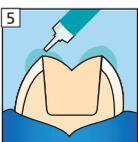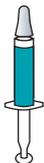


\* pro Segment und mm Keramik

Polieren



Fluor Protector

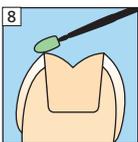


### Präparation

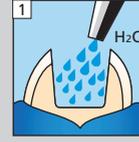


Total Etch optional

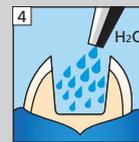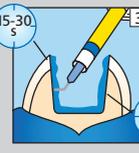

Adhese Universal

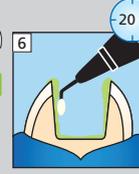

Bluephase Style

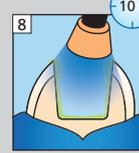

Pfützenbildung vermeiden



mehr Informationen unter [www.cementation-navigation.com](http://www.cementation-navigation.com)

CE 0123



Bitte Gebrauchsinformation beachten

ivoclar vivadent clinical


Erstellungsdatum: 2015-07-06  
681581/DE/Rev. 0

# Variolink® Esthetic DC


Eingliederung von Kronen und Brücken  
(Glaskeramik, z. B. IPS e.max®)

## Einprobe

Variolink Esthetic Try-In

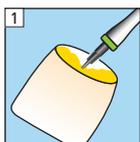


Auftragen der Try-In Paste

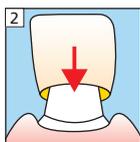


Einprobe der Restauration



Reinigung nach der Einprobe

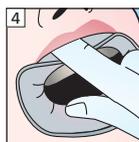

Trockenlegung

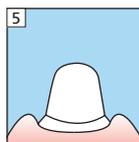


## Restauration




H<sub>2</sub>O




LUFT!

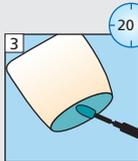

20 s

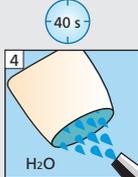

H<sub>2</sub>O

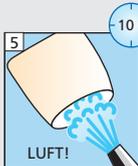

10 s

Monobond Etch & Prime




## Präparation



H<sub>2</sub>O



LUFT!

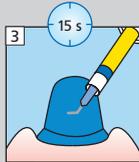

15 s

Total Etch

optional



H<sub>2</sub>O




LUFT!



20 s

Adhese Universal

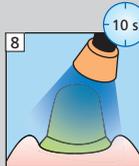

10 s



Bluephase Style




Pfützenbildung vermeiden

## Befestigung


Variolink Esthetic DC

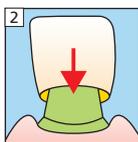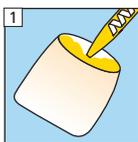


Bluephase Style

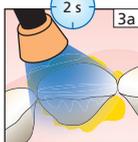


2 s

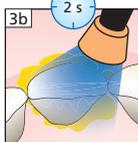


3a 3b 2 s

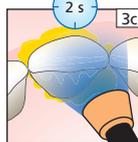

2 s


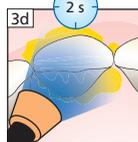


3c 3d 2 s

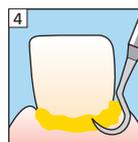


Restauration bis zum Ende der abschliessenden Polymerisation fixieren

Liquid Strip

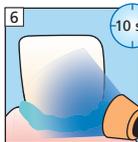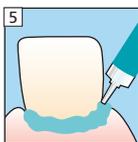


10 s\*

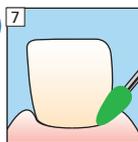

Polieren

\* pro Segment und mm Keramik

Fluor Protector

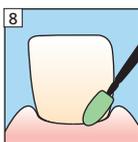

mehr Informationen unter [www.cementation-navigation.com](http://www.cementation-navigation.com)

CE 0123



Bitte Gebrauchsinformation beachten

ivoclar vivadent  
clinical