



Editors' Choice
THE DENTAL ADVISOR
www.dentaladvisor.com

BEWERTUNG:
Exzellent + + + + +
Sehr gut + + + +
Gut + + +

Variolink® Esthetic

Ivoclar Vivadent AG
www.ivoclarvivadent.com

Beschreibung

Variolink® Esthetic ist ein adhäsives Befestigungscomposite für die definitive Eingliederung von Keramik- und Composite-Restaurationen. Variolink Esthetic basiert auf den Vorgängermaterialien *Variolink II* und *Variolink Veneer* und vereint deren Eigenschaften. Es ist in einer lichthärtenden (LC) und einer dualhärtenden (DC) Version erhältlich. **Variolink Esthetic** enthält den patentierten Lichtinitiator *Ivocerin®* und ist daher zu 100% aminfrei, was für eine hohe Farbstabilität sorgt. **Variolink Esthetic LC** eignet sich für die Eingliederung von Inlays, Onlays und Veneers aus Glaskeramik, Lithiumdisilikat-Keramik und Composite mit einer Materialstärke von weniger als zwei Millimeter und ausreichender Transluzenz, die eine Lichtpenetration gewährleistet. **Variolink Esthetic DC** wurde für die Fälle entwickelt, in denen eine vollständige Lichthärtung nicht erreicht werden kann, wie z.B. bei opaken Keramik- und Composite-Inlays, -Onlays oder -Teilkronen, sowie Kronen und Brücken. Jede Variante ist in fünf Farben erhältlich: Light+, Light, Neutral, Warm, Warm+. **Variolink Esthetic LC** gibt es in Spritzen mit 2 Gramm Inhalt, während **Variolink Esthetic DC** in Automixspritzen zu jeweils 5 und 9 Gramm geliefert wird. Das **Variolink Esthetic** System Kit enthält jeweils eine Spritze Zement und Try-in Paste in den Farben Warm, Neutral und Light, sowie Ätzel, *Adhese Universal* im *VivaPen*, *Monobond Plus*, *Liquid Strip* und diverses Zubehör.

Variolink Esthetic wurde von 31 Testzahnärzte in mehr als 300 Anwendungen beurteilt. Das adhäsive Composite-Befestigungsmaterial erhielt ein klinisches Rating von 98%.

Produkteigenschaften

Verpackung/ Herstelleranleitung

Variolink Esthetic wird als vollständiges Kit mit allen für die definitive Eingliederung von Keramik- und Compositrestaurationen notwendigen Produkten angeboten. Das Kit selbst enthält eine Flow Chart, die den richtigen Ablauf und die Anwendung der Materialien auf Zahn und Restauration beschreibt. Eine separate laminierte Infokarte und eine Gebrauchsinformation bieten weitere detaillierte Informationen. Das Farbsystem mit den Farben Light bis Warm basiert nicht auf bestimmten Farbtönen, sondern vielmehr auf der Fähigkeit des Zements, die Restauration leicht aufzuhellen, abzudunkeln oder in ihrer Farbe zu erhalten. Try-in Pasten entsprechen der Farbe des ausgehärteten Zements und können leicht mit Wasser entfernt werden. Zementfarben bleiben nach der Lichthärtung unverändert. Es treten keine Farbveränderung auf. Die Viskosität des Materials ermöglicht ein Einsetzen der Restaurationen mit minimalem Druck und das leichte Entfernen von Zementüberschüssen vor und nach der Lichthärtung.



Kommentare der Testzahnärzte

„Komplettes Kit mit allem, was man braucht.“

„Mit Variolink Esthetic ist mir eine präzise Farbanpassung gelungen.“

„Gute Überschussentfernbarkeit.“

„Das Farbsystem ist anders, aber es ergibt Sinn.“

