

# IPS e.max<sup>®</sup> Ceram Selection



all ceramic  
all you need

ivoclar  
vivadent<sup>®</sup>  
passion vision innovation

# IPS e.max® Ceram Selection

**IPS e.max® Ceram Selection ofrece unos materiales Enamel y Effect nuevos que inspirarán a los profesionales por la luminosidad de sus colores y por sus impresionantes propiedades ópticas.**

IPS e.max Ceram Selection comprende 12 materiales que han sido especialmente diseñados para darle a los profesionales mas espacio para la creatividad y personalización en la técnica de estratificación. Los materiales se utilizan en combinación con los materiales IPS e.max Ceram ya existentes y facilitan la creación de caracterizaciones personalizadas – con el objetivo de lograr unas restauraciones altamente estéticas y de aspecto natural.

Los técnicos dentales reconocidos Oliver Brix (Alemania), August Bruguera (España) y Gérald Ubassy (Francia) han dado forma sustancialmente al concepto sobre el que IPS e.max Ceram Selection se ha basado. Estos materiales con colores especiales y sus aplicaciones son el resultado de muchos años de éxito trabajando con IPS e.max Ceram.

Los doce colores están divididos en tres grupos:

- Special Enamel – materiales Enamel coloreados
- Light Reflector – materiales Effect reflectantes de luz
- Light Absorber – materiales Effect absorbentes de luz



Hecho para la  
creación natural

Creados desde la pasión  
y la experiencia ...



A stylized handwritten signature in black ink.



aqua citrine honey apricot quartz

... con el objetivo de copiar la  
naturaleza lo más fielmente posible ...



A stylized handwritten signature in black ink.



diamond silk fog

... y la aspiración  
de compartir el conocimiento.



A stylized handwritten signature in black ink.



salmon cream lavender taupe

# Special Enamel

Los seis materiales **Special Enamel** tienen diferentes materiales Enamel coloreados con una translucidez similar al esmalte.



# Light Reflector

Los tres materiales **Light Reflector** son materiales Effect reflectores de luz.



cream



salmon



silk

# Light Absorber

Los tres materiales **Light Absorber** son materiales Effect absorbentes de luz



fog



lavender



taupe

# Guía de materiales Selection

## *Color y translucidez*


(Tabla de color con un grosor de capa de 1 mm)

Grupo

Special Enamel

**aqua**

Material Enamel Intenso para mejorar el color y la longitud de los márgenes incisales

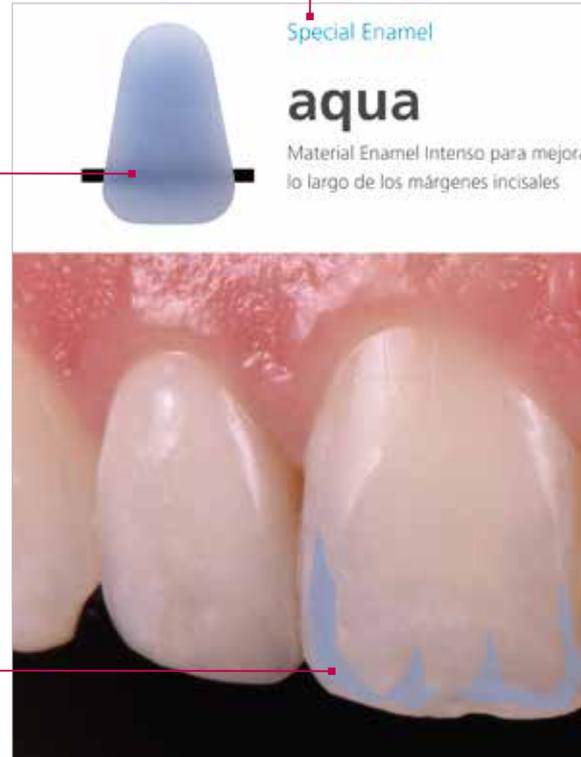

## *Ejemplo de posicionamiento*

## Descripción de producto

ar el efecto translúcido azulado a



## Ámbito de aplicación



▶ Zona Incisal



▶ Zona Intermedia



▶ Zona Incisal  
▶ Zona Intermedia



▶ Zona Intermedia  
▶ Zona de la Dentina



*Efecto natural*

Special Enamel

# aqua

Material Enamel Intenso para mejorar el efecto translúcido azulado a lo largo de los márgenes incisales





Special Enamel

# citrine

Material Enamel amarillento para el ajuste de la saturación de color y la saturación y para acentuar la zona incisal.



Special Enamel

# honey

Material Enamel color miel para el ajuste de la saturación de color y para acentuar la zona incisal.






Special Enamel

# apricot

Material Enamel color albaricoque para el ajuste de la saturación de color y para acentuar la zona incisal.

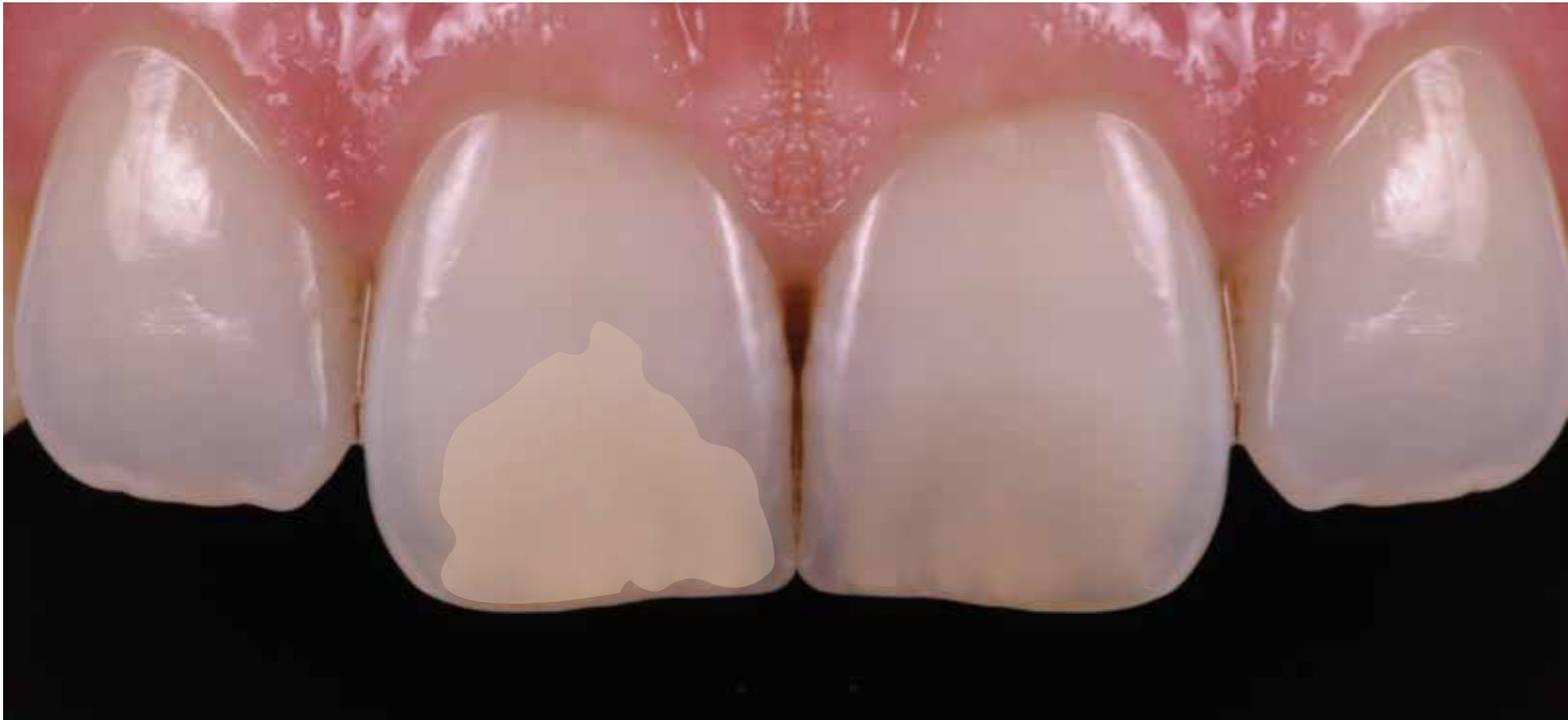

Special Enamel

# quartz

Material Enamel color gris claro para el ajuste de la saturación de color y para acentuar la zona incisal.



Special Enamel

# diamond

Material Incisal universal de color neutro para la región anterior






Light Reflector

## cream

Material Effect color crema para reproducir las zonas reflectantes de color en el tercio cervical e incisal


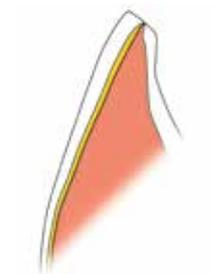




Light Reflector

# salmon

Material Effect color salm3n para reproducir las zonas reflectantes de color en el tercio cervical e incisal

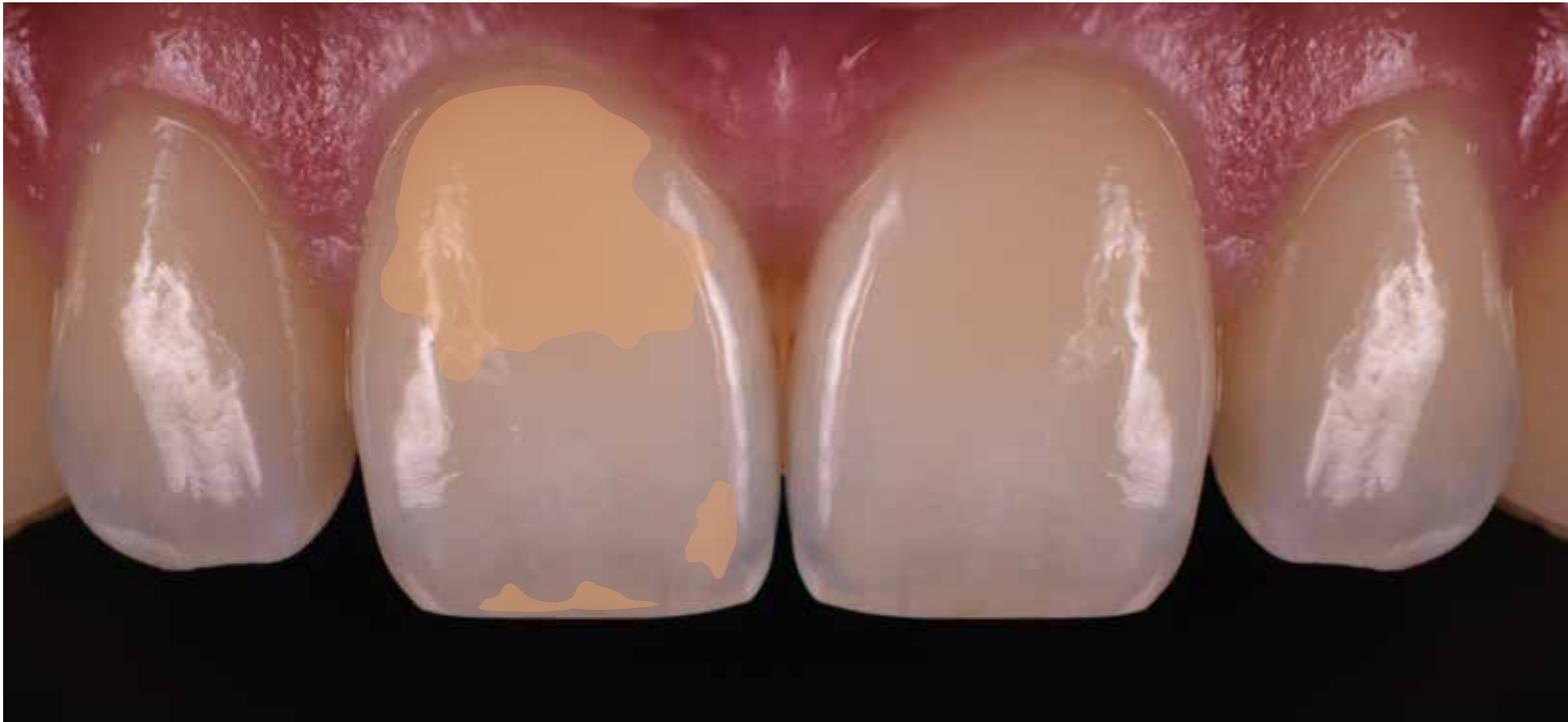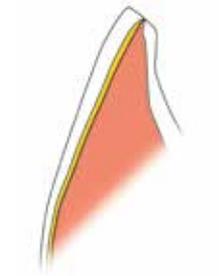



Light Reflector

# **silk**

Material Effect blanquecino para incrementar los valores de luminosidad en la zona incisal





Light Absorber

# fog

Material Effect grisáceo para incrementar los valores de luminosidad en la zona incisal



Light Absorber

# lavender

Material Effect color lila para crear zonas de absorción en el tercio incisal y cervical y en las zonas proximales.






Light Absorber

# taupe

Material Effect color lila-marrón para crear zonas de absorción en el tercio incisal y cervical y a lo largo de las zonas proximales.

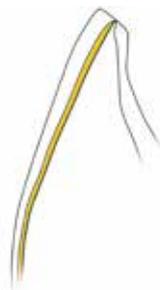

## Formatos de suministro

### **Kit IPS e.max Ceram Selection**

- IPS e.max Ceram Special Enamel, 1x 5 g de cada color: aqua, citrine, honey, apricot, quartz, diamond
- IPS e.max Ceram Light Reflector, 1x 5 g de cada color: cream, salmon, silk
- IPS e.max Ceram Light Reflector, 1x 5 g de cada color: fog, lavender, taupe



### **Reposición**




**IPS e.max Ceram  
Special Enamel, 1x 5 g**  
Colores: aqua, citrine, honey,  
apricot, quartz, diamond



**IPS e.max Ceram  
Light Reflector, 1x 5 g**  
Colores: cream, salmon, silk







**IPS e.max Ceram  
Light Absorber, 1x 5 g**  
Colores: fog lavender taupe

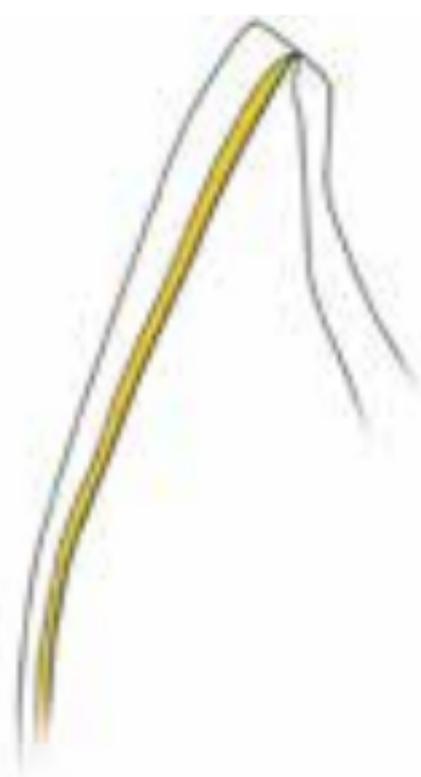




# IPS e.max® Ceram Selection

## Special Enamel

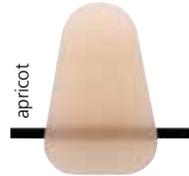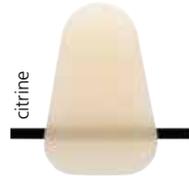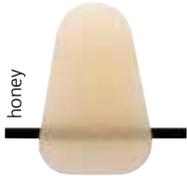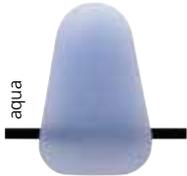

## Light Reflector

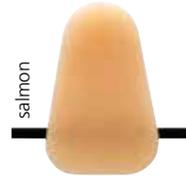

## Light Absorber

