


Ivoclar Vivadent

Implant Care Programm

*Mundgesundheits-Management bei Implantaten
Lösungen mit System*

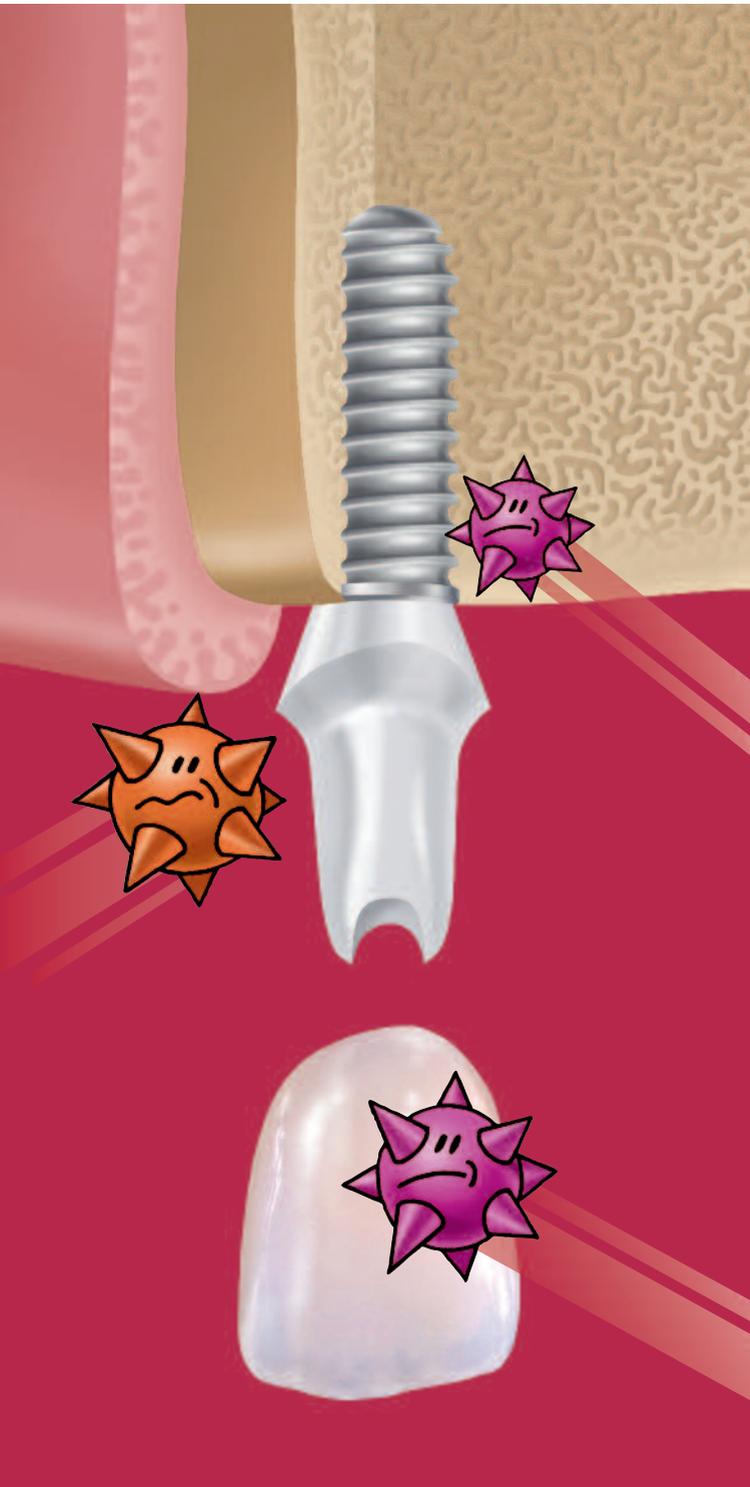

Implant Care

*Mundgesundheits-Management
bei Implantaten
Lösungen mit System*





Inhalt

Das Konzept Implant Care

Implant Care Produkte

- OptraGate
- Plaque Test
- Proxyt
- Cervitec Plus
- Cervitec Gel
- Cervitec Liquid

Implant Care

*Unterstützt die Qualitätssicherung
bei Implantaten*

Patienten mit Implantaten brauchen besondere Betreuung – ein Leben lang

Während der verschiedenen Phasen der Implantat-Behandlung und der lebenslangen Nachsorge brauchen Ihre Patienten Ihre professionelle Betreuung. Massnahmen und Präparate müssen den besonderen Anforderungen Ihrer Implantat-Patienten auf die Dauer Rechnung tragen. Mit Implant Care offeriert Ivoclar Vivadent Ihnen ein abgestimmtes Produktkonzept, das diese speziellen Bedürfnisse berücksichtigt.

Besondere Risiken

Implantate sind im Mund vielen Einflüssen ausgesetzt. Bakterieller Biofilm im Bereich der Implantat-Versorgung und entzündliche Prozesse im Mund können ideale Ausgangsbedingungen für eine Gefährdung der Implantate und ihrer Suprastrukturen schaffen. Periimplantäres Gewebe unterliegt bei Akkumulation von Plaque einem deutlich höheren Entzündungsrisiko als die Gingiva. Es kommt zu einer Mukositis, die in einer Periimplantitis münden kann.

Strategien zur Sicherung von Implantaten

Erfolgreiche Implantatversorgung

Prävention und Pflege

vor der Implantation

während der chirurgischen Behandlung

während der Einheilphase

nach Einsetzen der Suprastruktur



Den Risiken vorbeugen

Suprastrukturen, natürliche Zähne und Zahnersatz müssen konsequent gepflegt werden. Allerdings reichen manuelles Geschick und/oder Compliance der Patienten häufig nicht aus, die sensiblen Bereiche mit der erforderlichen Genauigkeit zu versorgen. In Ihrer Praxis können Sie Ihren Patienten eine adäquate Betreuung bieten. Die regelmässige professionelle Reinigung und gezielte Keimkontrolle sorgen für eine gesunde Umgebung im Mund.

Spezielle Anforderungen bei Implantaten


Aufgrund komplexer Strukturen und zusätzlicher Verbindungsstellen weisen Implantatversorgungen mehr Risikostellen als die natürlichen Zähne auf.

Versorgt werden müssen

- ▶ komplexe Strukturelemente
- ▶ anspruchsvolles periimplantäres Gewebe
- ▶ vorhandene natürliche Zähne
- ▶ Zahnersatz
- ▶ Gingiva und Mukosa

Dabei sind verschiedene Ziele zu erreichen

- ▶ Vorbeugen einer Mukositis
- ▶ Vorbeugen einer Periimplantitis
- ▶ Sichern der Qualität Ihrer implantologischen und restaurativen Leistungen
- ▶ Gesunderhalten des Mundes
- ▶ Erhalten der Funktion und Ästhetik

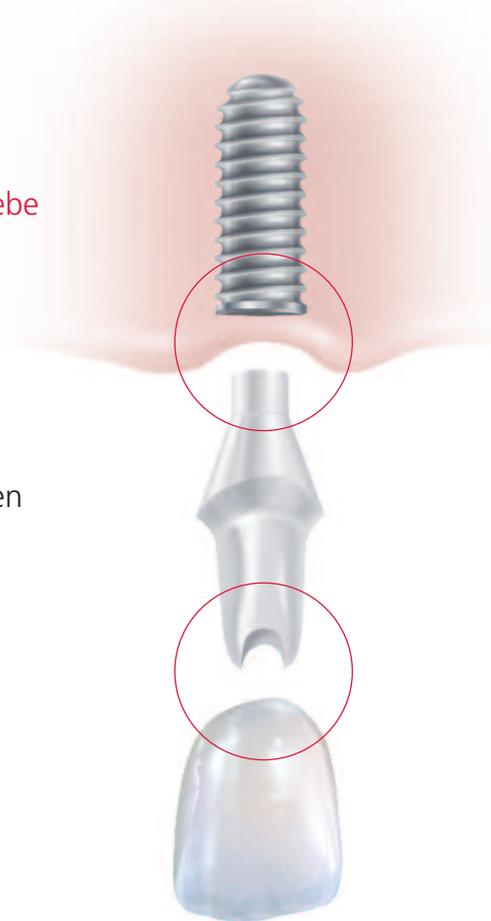

Implant Care

Das abgestimmte Konzept

Das gezielte Angebot


Implant Care umfasst Produkte und Serviceleistungen, die Sie als Praxisteam und Ihre Patienten bei der langfristigen Qualitätssicherung wertvoller Implantatversorgungen unterstützen.

Implant Care legt Wert auf effektive Produkte, die

- ▶ die speziellen Anforderungen bei Implantaten berücksichtigen
- ▶ Funktion und Ästhetik erhalten
- ▶ sich einfach in Behandlungsablauf und Praxisroutine integrieren lassen
- ▶ die Betreuung für Sie und Ihre Patienten so effizient und angenehm wie möglich gestalten

Implant Care Produkte im Überblick

- ▶ OptraGate
- ▶ Plaque Test
- ▶ Proxyt
- ▶ Cervitec Plus
- ▶ Cervitec Gel
- ▶ Cervitec Liquid

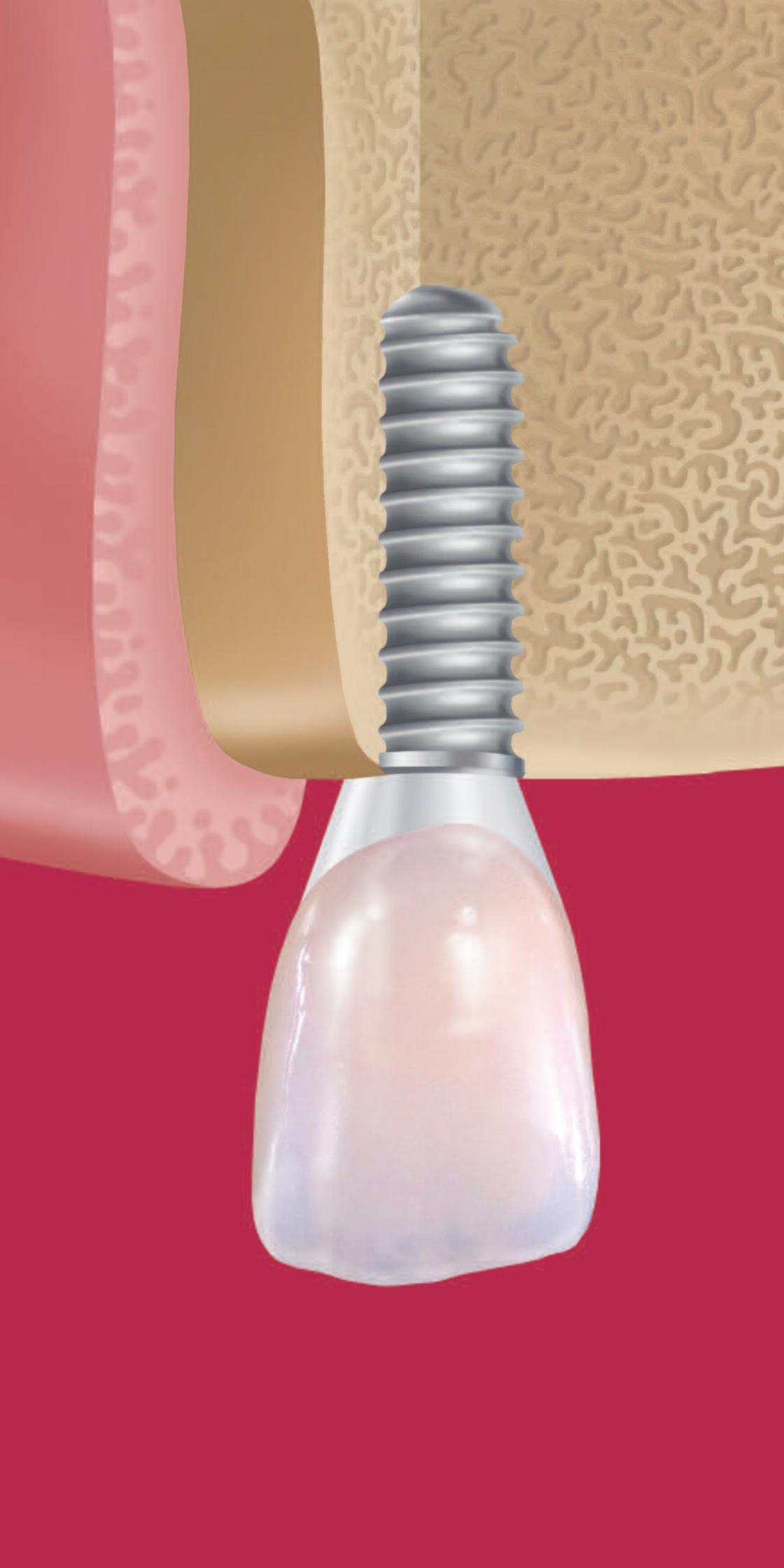

OptraGate[®]

Der flexible Lippen-Wangen-Halter

Komfort für Praxisteam und Patient

Bei Implantat-Patienten sind komplizierte Konstruktionen wie zum Beispiel Anker oder Stege zu versorgen. Ein übersichtliches Arbeitsfeld erleichtert Ihnen die Behandlung ungemein. Der innovative OptraGate hält Lippen und Wangen ab und ermöglicht Ihnen damit den freien Zugang zu den anspruchsvollen Suprastrukturen.

Die Vorteile

- ▶ Hält Lippen und Wangen zirkulär ab
- ▶ Dreidimensionale Flexibilität
- ▶ Verschiedene Grössen

Ihr Nutzen

- ▶ Übersichtliches Arbeitsfeld, besserer Zugang, schnelleres Behandeln
- ▶ Angenehmes Offenhalten des Mundes während längerer Behandlungen
- ▶ Individuelle Passform für Ihre Patienten



OptraGate –
der flexible Lippen-Wangen-Halter

OptraGate erleichtert den freien Zugang zur Stegversorgung



Die Lippen stören nicht beim Reinigen des Steges mit Floss



Bilder: Zt K. Gmür & Za R. Watzke

Plaque Test

Die fluoreszierende Indikatorflüssigkeit

Sichtbar – Unsichtbar

Plaque sammelt sich an Stellen, die schwer zu reinigen sind. Für Patienten ist sie ohne weiteres nicht erkennbar. Implantate erfordern aber eine optimale Mundhygiene. Das Visualisieren vorhandener Plaque mit Plaque Test erleichtert Ihnen, das Problem deutlich sichtbar zu machen.

Die Vorteile


- ▶ Fluoresziert unter jeder Polymerisationslampe
- ▶ Nur Plaquezonen leuchten
- ▶ Färbt nur den Biofilm an

Ihr Nutzen

- ▶ Einfach in Ihre Praxisroutine zu integrieren
- ▶ Eindeutige Befundaufnahme
- ▶ Keine lästigen Verfärbungen



Plaque Test

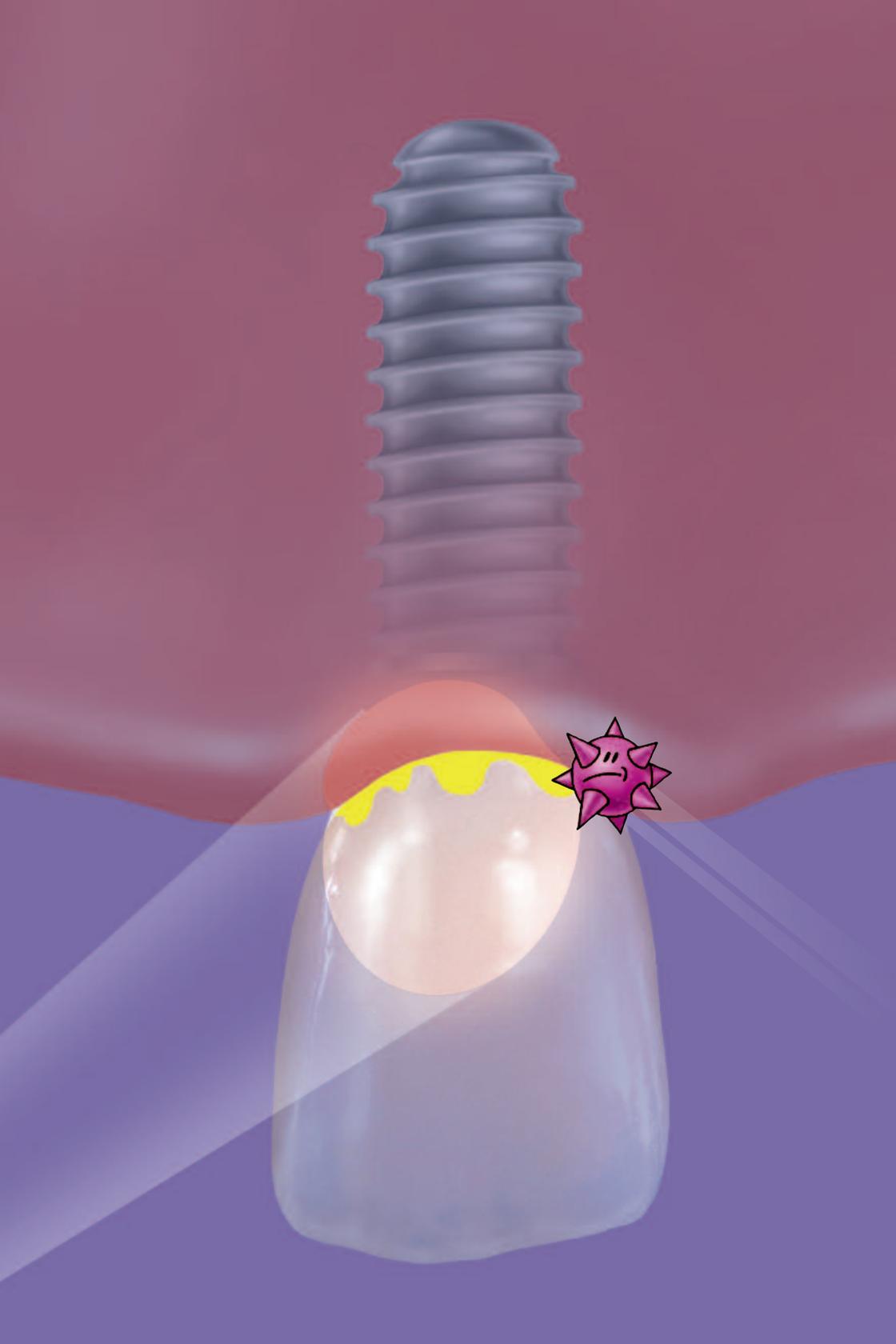

Bakterieller Biofilm
sichtbar gemacht mit
Plaque Test

Proxyt[®]

Die feine Prophy-Paste mit RDA* 7

Wert der Implantate erhalten

Die professionelle Zahnreinigung gehört zur lebenslangen Basisvorsorge gegen periimplantäre Erkrankungen. Mit der feinen Prophy-Paste Proxyt können Sie wirkungsvoll und dabei besonders schonend reinigen und polieren.

Die Vorteile	Ihr Nutzen
<ul style="list-style-type: none">▶ Definierter RDA-Wert▶ Ohne Bimsstein▶ Xylit	<ul style="list-style-type: none">▶ Kontrolliertes Reinigen und Polieren▶ Schonen des empfindlichen periimplantären Gewebes▶ Stören des Bakterienstoffwechsels

*RDA: Relative Dentin Abrasion



Die feine Proxyt

Schonendes Reinigen mit der feinen Proxylt, Implantat bei 23 mit Krone aus IPS e.max ZirPress



Natürlicher Glanz und gepflegtes Gewebe nach dem professionellen Reinigen



Bilder: Zt. F. Perkon & Za R. Watzke



Cervitec® Plus

Der Schutzlack mit Chlorhexidin

Schutz im Risikobereich

Der Übergang von Suprastruktur zu periimplantärem Gewebe bildet eine Risikostelle für bakterielle Angriffe. Mit dem chlorhexidin-haltigen Schutzlack Cervitec Plus können Sie entlang der Ränder der Implantatversorgung die Abwehr gezielt stärken.

Die Vorteile

- ▶ 1% Chlorhexidin & 1% Thymol
- ▶ Fließ- und Benetzungsverhalten
- ▶ Farblos, transparent

Ihr Nutzen


- ▶ Wirksame Keimkontrolle
- ▶ Versorgen auch schwierig zu erreichender Zonen – zum Beispiel an Stegen
- ▶ Optimale Ästhetik bei Implantaten im Frontzahnbereich



Multi Dose Cervitec Plus



Single Dose Cervitec Plus

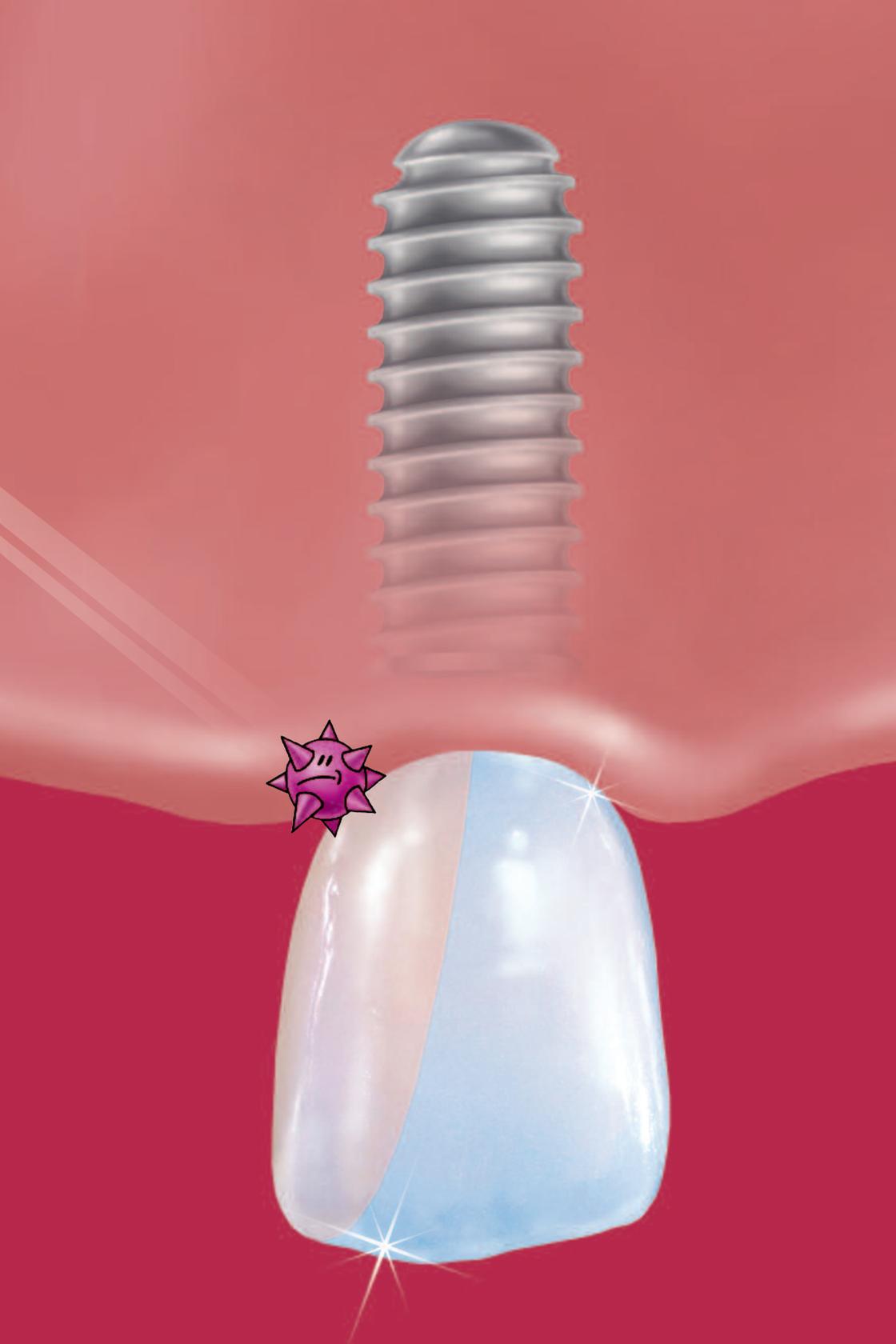

Der farblose, transparente Lack eignet sich perfekt für die Versorgung im Frontzahnbereich

Gezielte, einfache Applikation von Cervitec Plus bei Ankern

Bilder: Zt F. Perkon & Za R. Watzke

Cervitec® Gel

*Das Mundpflege-Gel
mit Chlorhexidin und Fluorid*

Plaquebildung vorbeugen

Patienten mit entzündlichen Erkrankungen im Mund benötigen spezielle Pflegeprodukte. Cervitec Gel mit Chlorhexidin und Fluorid unterstützt Ihre professionelle Behandlung. Chlorhexidin vermindert schädliche Keime und hemmt die Plaquebildung. Entzündungen des Weichgewebes wie eine Mukositis gehen zurück.

Die Vorteile


- ▶ 0,2% Chlorhexidin & 900 ppm Fluorid
- ▶ Geschmeidige Konsistenz
- ▶ Angenehmer Geschmack

Ihr Nutzen

- ▶ Kombinierte Stärke
- ▶ Optimales Verteilen auf komplexen Oberflächen
- ▶ Hohe Compliance Ihrer Patienten



Cervitec Gel

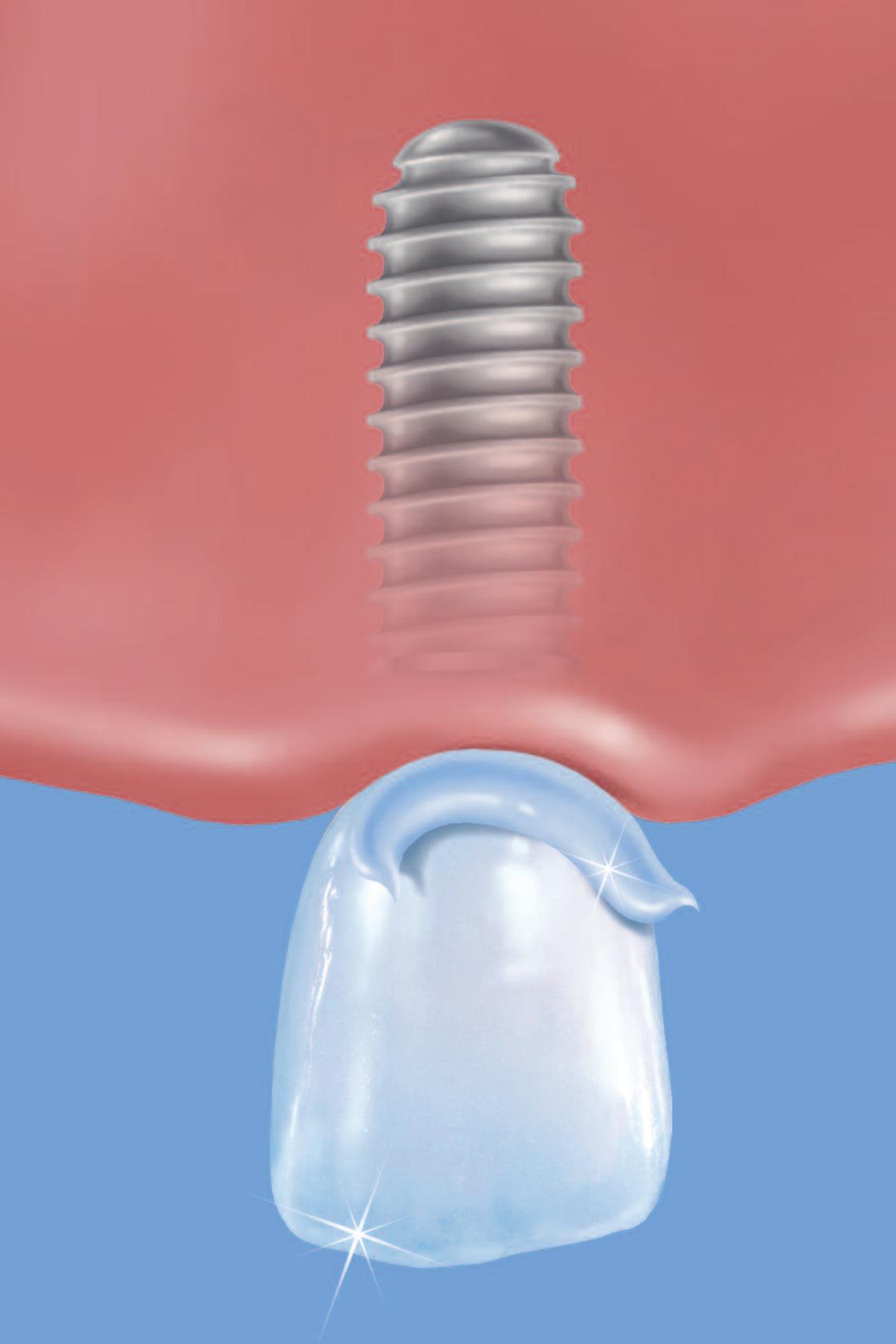

Das geschmeidige Cervitec Gel lässt sich sehr gut unter dem Steg verteilen

Cervitec Gel einfach mit der weichen Zahnbürste anwenden

Bilder: Zt K. Gmür & Za R. Watzke

Cervitec[®] Liquid

Die antibakterielle Mundspüllösung

Eine Mundspüllösung für zahlreiche Einsatzgebiete

Ihr Behandlungsplan und spezielle Bedürfnisse Ihrer Patienten erfordern während der Implantatbehandlung den Einsatz einer antibakteriellen Mundspüllösung. Das gebrauchsfertige Cervitec Liquid sorgt für die optimale Verteilung der Inhaltsstoffe Chlorhexidin und Xylit sowie weiterer gesundheitsförderlicher Komponenten im gesamten Mundraum.

Die Vorteile

- ▶ 0,1% Chlorhexidin plus Xylit plus ätherisches Öl
- ▶ Alkoholfrei
- ▶ Angenehmer Geschmack

Ihr Nutzen

- ▶ Effektive Keimkontrolle
- ▶ Geeignet für sensible Patientengruppen
- ▶ Hohe Anwendungsbereitschaft, die den Behandlungserfolg fördert



Cervitec Liquid



Anwendung von Cervitec Liquid
zu Hause...



...und Cervitec Liquid
in der Praxis

Cervitec[®]

Gezielter Schutz – kontrolliertes Risiko

Chlorhexidin und mehr

Von zentraler Bedeutung für die langfristig erfolgreiche Implantat-Versorgung sind die effektive Keimkontrolle und die Vermeidung von Entzündungen im Mund. Die Cervitec-Produktlinie mit Chlorhexidin bietet Ihnen individuelle Lösungen hinsichtlich der Konzentration, Darreichung, Applikation und zusätzlicher Komponenten für die speziellen Anforderungen Ihrer Implantat-Patienten.

Zur Wahl stehen Ihnen Präparate zur Applikation in der Praxis und für Ihre professionelle Empfehlung an Ihre Patienten für die Anwendung zu Hause.

Ausgewählte Beispiele zum Einsatz von Schutzlack, Mundpflege-Gel und Mundspüllösung im Verlauf der Implantat-Behandlung:

Indikation

Vor der Implantation

Aerosolrisiko

Direkt nach der Implantation

Einheilphase

Temporäre Versorgung

Einsetzen der Suprastruktur

Regelmässige Nachsorge

Mukositis

Prothesenstomatitis

Im Verlauf aller Phasen der Implantat-Behandlung fördern Cervitec Produkte aus dem Implant Care Programm den Behandlungserfolg und tragen zur Qualitätssicherung bei.

Cervitec Plus	Cervitec Gel	Cervitec Liquid	Implant Care – Einsatz der Cervitec-Produkte
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Klinische Bilder:
Za T. Duffing und
Ztm R. Gläser

Implant Care

Pflege mit klarem Fokus

Individuelle Pflege für individuelle Implantate

Eigenschaften wie Material, Darreichung, Handhabung und Applikation der Implant Care Produkte orientieren sich an den speziellen Bedürfnissen bei Implantatversorgungen.

Vorteile für das Praxisteam


- ▶ Einfache Integration in Behandlungsablauf und Praxisroutine
- ▶ Klinische Erfahrung bei Implantat-Patienten
- ▶ Aufbau einer langfristigen Patientenbindung

Vorteile für Patienten

- ▶ Schmerzfreie Behandlung
- ▶ Wohlbefinden während und nach der Behandlung
- ▶ Langfristiger Erhalt der Implantate



Vorteile für Patient und Praxisteam

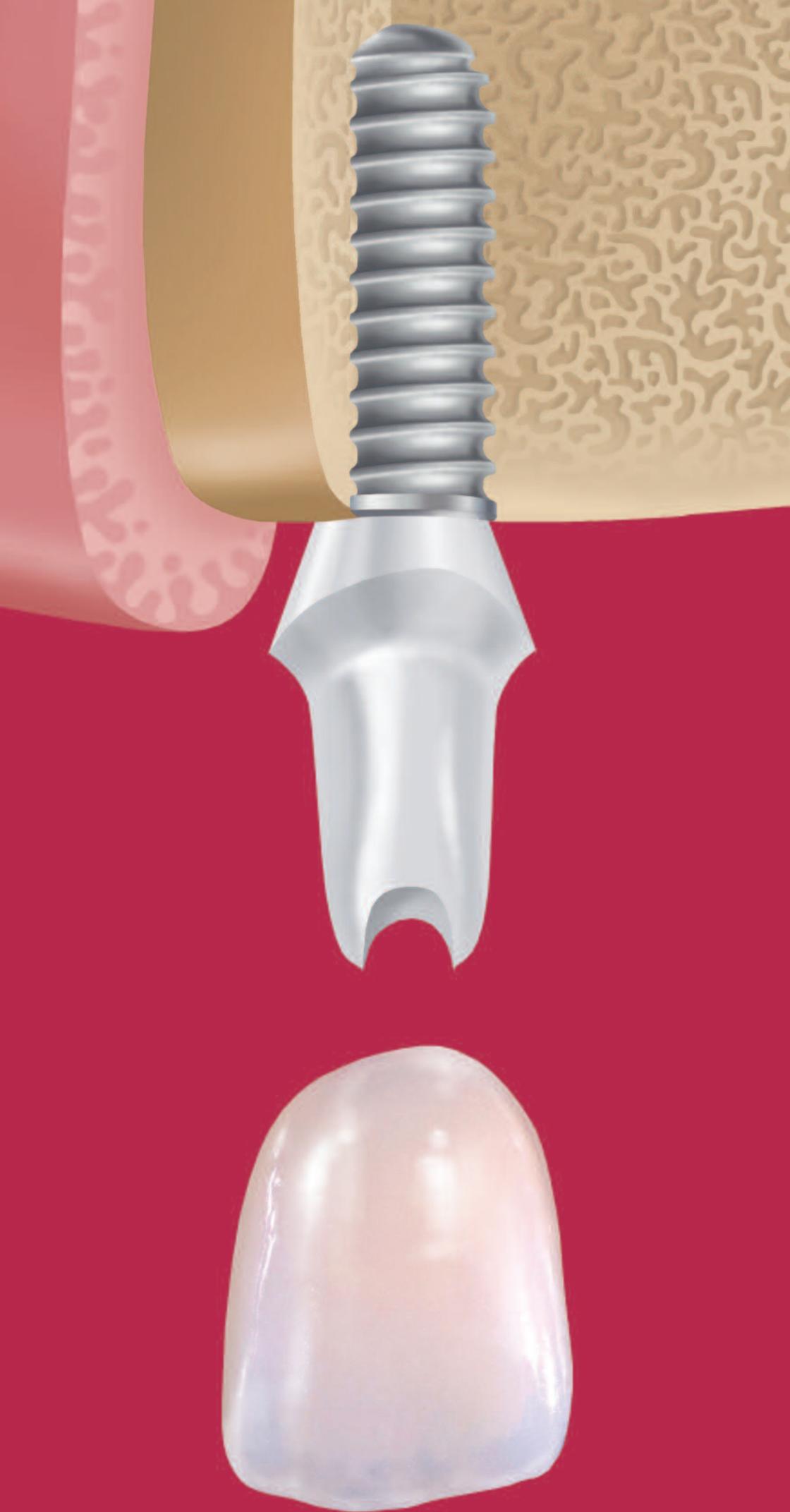

Implant Care

*Rundum geschützte Implantat-
versorgungen*

OptraGate

*Der flexible Lippen-
Wangen-Halter*



Cervitec Liquid

*Die antibakterielle
Mundspüllösung*



Cervitec Gel

*Das Mundpflege Gel
mit Chlorhexidin
und Fluorid*





Plaque Test
*Die fluoreszierende
Indikatorflüssigkeit*



Proxyl
*Die feine Prophy-Paste
mit RDA 7*



Cervitec Plus
*Der Schutzlack mit
Chlorhexidin*

Ivoclar Vivadent

Mundgesundheits-Management

Professional Care Programm

Ein erfolgreiches Mundgesundheits-Management umfasst den ganzen Mund. Neben den Implantat-versorgungen müssen alle Zähne – seien es gesunde, restaurierte oder ersetzte – sowie die Gingiva professionell versorgt werden. Auch dafür bietet Ihnen Ivoclar Vivadent klinisch wirksame Produkte.

Das abgestimmte Professional Care Programm erleichtert Ihnen die Beurteilung des individuellen Behandlungsbedarfs und ermöglicht Ihnen das erfolgreiche Kombinieren verschiedener Massnahmen.

Schnelle Abklärung

- ▶ **CRT bacteria** –
Der Test zum Erfassen der Mutans Streptokokken und Laktobazillen in Speichel und Plaque
- ▶ **CRT buffer** –
Der Test zum Bestimmen der Pufferkapazität des Speichels
- ▶ **Plaque Test** –
Die fluoreszierende Indikatorflüssigkeit zum Entdecken der Plaque

Behandlung nach Mass

- ▶ **Cervitec** – Der Schutzlack, das Mundpflege-Gel, die Mundspüllösung mit Chlorhexidin und mehr
- ▶ **Fluor Protector** –
Der Schutzlack und das Spezialpflege-Gel mit Fluorid und mehr
- ▶ **VivaSens** – Der Desensitizer für überempfindliche Zähne
- ▶ **Proxylt** – Die Pasten zur professionellen Zahnreinigung und Politur
- ▶ **OptraGate** – Der sanfte Lippen-Wangen-Halter



Der ästhetische
fluoridhaltige Lack
Fluor Protector
stärkt die
natürlichen Zähne

Bild: Dr. A. Peschke

Ivoclar Vivadent

Implant Esthetics

Im Bereich Implant Esthetics bietet Ihnen Ivoclar Vivadent für ästhetische Implantatversorgungen hochwertige keramische Materialien wie IPS Empress oder IPS e.max. Diese erfüllen Ihren persönlichen Anspruch und den Wunsch Ihrer Patienten nach Funktion und Ästhetik. Mund, Zähne und ganz speziell implantatgetragene Suprakonstruktionen benötigen Ihr professionelles Mundgesundheits-Management. Ivoclar Vivadent steht Ihnen dabei partnerschaftlich zur Seite. Implant Care Produkte zur Prävention, Therapie und Pflege unterstützen Sie, die Qualität von Implantatversorgungen langfristig zu sichern. Sie bauen das Leistungsangebot Ihrer Praxis zukunftsorientiert weiter aus und binden Ihre Patienten noch intensiver.

In Ihrem Interesse und dem Ihrer Patienten.

Literatur

Besimo CE, Guindy JS, Lewetag D, Meyer J: Prevention of bacterial leakage into and from prefabricated screw-retained crowns on implants in vitro; Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14:654-660

Bolis C, Huwig A: In-vitro-Charakterisierung eines chlorhexidin- und fluoridhaltigen Mundpflegegels; Prophylaxe Impuls 2008; 12: 126-133

Roos-Jansäker AM: Long time follow up of implant therapy and treatment of periimplantitis; Swed Dent J Suppl 2007; 188: 7-66

Rühling A, Wulff J, Schwahn C, Kocher T: Surface wear on cervical restorations and adjacent enamel and root cementum caused by simulated long-term maintenance therapy; J Clin Periodontol 2004; 31: 293-298

Sanderink RBA, Zitzmann N, Saxer UP, Schlagenhaut U, Persson R, Erne P: Parodontitis und Periimplantitis: In den menschlichen Körper disseminierende Biofilm-Infekte; Quintessenz 2008; 59(3): 273-285

Twetman S, Hallgren A, Sköld K, Modeer T: Effect of a chlorhexidine-containing varnish on gingival inflammation; J Dent Res 1997; 76:234

Zitzmann NU, Berglundh T: Definition and prevalence of peri-implant diseases; J Clin Periodontol 2008; 35(8):286-291



Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Gedruckt in Deutschland.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein.
627937/1210/d/W

Hersteller und Vertrieb:

Ivoclar Vivadent AG Clinical
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +432 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:

Ivoclar Vivadent GmbH Clinical
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49(0)7961 / 889-0
Fax +49(0)7961 / 6326
www.ivoclarvivadent.de
e-mail: info@ivoclarvivadent.de

ivoclar
vivadent
passion vision innovation