



IPS e.max® ZirCAD MT BL/LT 0

All ceramic,
all you need.

BASIC-Infiltration mit IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquids A–D

- 25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquids (A–D)
+
1  IPS e.max® ZirCAD Colouring Liquid Indicator red



1

1x mit Pinsel Nr. 5



2

1x mit Pinsel Nr. 5



3



1x mit Pinsel Nr. 5

4



1x mit Pinsel Nr. 5

5



1x mit Pinsel Nr. 5

6


Trocknungszeit
vor der individuellen
Advanced Infiltration




ADVANCED-Infiltration mit IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquids A–D

Empfehlungen


für die Einfärbung der Effektfarben
mit IPS e.max® ZirCAD Colouring
Liquid Indicator:

25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT
Colouring Liquid grey, violet


+

1  IPS e.max® ZirCAD Colouring
Liquid Indicator yellow




25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT
Colouring Liquid orange

+

1  IPS e.max® ZirCAD Colouring
Liquid Indicator blue



25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT
Colouring Liquid blue

+

1  IPS e.max® ZirCAD Colouring
Liquid Indicator blue + yellow (= green)



7



Auftrag grey im Inzisal- und Randleistenbereich
für natürliche Tiefenwirkung

1x mit Pinsel Nr. 1 oder 3

8



Transluzenzeffekte mit blue im Inzisalbereich

1x mit Pinsel Nr. 1 oder 3

9



Transluzenzeffekt mit violet im Inzisal-
und Halsbereich

1x mit Pinsel Nr. 1 oder 3

10

Trocknungszeit
vor dem Sintern

