

# Optra®

Accesorios innovadores



Para **tratamientos  
restauradores  
eficientes**

Estética  
eficiente

  
ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation

# OptraGate®

## Sencillo control de humedad

---

OptraGate® es un retractor para labios y mejillas sin látex. Su flexibilidad y elasticidad únicas permiten que sea cómodo de usar y ayudan a los pacientes a mantener la boca abierta.

**Aislamiento eficaz** gracias a un acceso más fácil.

**Procedimientos de tratamiento** focalizados y eficientes

Utilizado en más de

**70 millones** de tratamientos hasta la fecha\*

---



\* Basado en cifras de ventas

# La estética es imposible sin el control de la humedad

---

El aislamiento adecuado es esencial para realizar restauraciones directas exitosas y evitar la contaminación de la cavidad con saliva, secreciones y sangre.

A menudo, el aislamiento relativo es suficiente para lograr buenos resultados y la aceptación del paciente es alta para esta forma de aislamiento. Independientemente de si está realizando una obturación con composite o cementando una restauración de cerámica, OptraGate es una ayuda eficaz y eficiente, una base sólida para el éxito clínico a largo plazo de las restauraciones estéticas.



Restauración de un diente de leche mediante aislamiento relativo



Inserción de una corona parcial en LL6 usando aislamiento relativo

Fotos: cortesía del Dr. en Odontología Knut Hufschmidt, Austria

1

2

3

4

5

6

## Estética eficiente

Los productos, coordinados de manera óptima para los procedimientos de restauración directa, mejoran la eficiencia para lograr restauraciones estéticas de alta calidad.



### Aislar

Aislamiento eficaz con **OptraGate**<sup>®</sup>, rollos de algodón y aspirador de saliva



### 2 Adherir

Aplicación intraoral directa de **Adhese**<sup>®</sup> **Universal** con el eficiente VivaPen<sup>®</sup>



### 4 Modelar

Modelado más rápido con **OptraSculpt**<sup>®</sup> gracias a su efecto antiadherente



### 3 Restaurar

**Técnica directa**  
**Línea Tetric Evo** – una solución para todo tipo de cavidades

**Técnica indirecta**  
Restauraciones estéticas realizadas con **IPS e.max**<sup>®</sup>, mediante cementación óptima con **Variolink**<sup>®</sup> **Esthetic**



### 5 Polimerizar

Polimerizado rápido y fiable con las lámparas de polimerización **Bluephase**<sup>®</sup>



### 6 Pulir

Pulido de alto brillo en un solo paso con **OptraPol**<sup>®</sup>

# Aislamiento eficaz gracias a un acceso más fácil

El retractor de labios y mejillas permite un fácil acceso a un campo de tratamiento más amplio. Por eso, es más fácil para los médicos observar la salivación, eliminarla directamente y así minimizar el riesgo de contaminación.

OptraGate para el aislamiento relativo habitual

OptraDam Plus  
para un aislamiento total



# Procedimientos de tratamiento focalizados y eficientes.

OptraGate retrae los labios y las mejillas de manera uniforme y suave, por lo que ya no es necesario usar un espejo dental para ayudar a retraer los tejidos blandos. Además, OptraGate también ayuda a los pacientes a

mantener la boca abierta durante un periodo de tiempo prolongado, permitiendo procedimientos de tratamiento eficientes. Los diferentes colores disponibles están diseñados para agrandar a los niños y mejorar su aceptación.

## Indicaciones muy versátiles

OptraGate ofrece una solución eficaz en muchas situaciones clínicas diferentes, mucho más que el control de la humedad. La molesta retracción del tejido blando es cosa del pasado con OptraGate.



Escáneres intraorales



Prótesis



Tratamientos restauradores



Asistencia profesional en niños



Tratamiento restaurador en niños



Odontología pediátrica

Fotografías: cortesía de Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

“ Como médico clínico, me beneficio del fácil acceso a un campo de tratamiento más amplio y de un procedimiento sencillo para lograr un aislamiento relativo. Además, ahora puedo realizar muchos tratamientos sin la ayuda de un asistente dental. OptraGate me permite concentrarme completamente en mi paciente y en la situación clínica en cuestión. ”



Dr. en Odontología  
Knut Hufschmidt  
Austria

OptraGate se coloca en unos pocos segundos.  
La colocación es sencillísima. ¡Compruébelo usted mismo!



Pulse aquí para ver el vídeo:  
[www.ivoclarvivadent.com/OptragateFlowchart](http://www.ivoclarvivadent.com/OptragateFlowchart)




# OptraSculpt®

## Modelado más rápido gracias al efecto antiadherente

---

OptraSculpt® y OptraSculpt Pad son instrumentos de modelado adecuados para dar forma y perfilar superficies sin problemas de adherencia. Están especialmente diseñados para dar forma a composites no polimerizados y moldeables en tratamientos restauradores directos y para modelar y alisar composites de laboratorio de tipo pasta.

A collection of dental sculpting instruments in various colors (blue, purple, white, black) are shown against a blurred background. One instrument is in sharp focus in the foreground, while others are out of focus in the background.

**Estética excelente:**  
el instrumento no deja marcas sobre la superficie de la restauración

---

**Modelado más sencillo**  
gracias al efecto antiadherente

---

**Requiere menos esfuerzo**  
para el acabado y el pulido



# Estética **excelente**

---

Dar forma y modelar los composites dentales de alta calidad de última generación es todo un reto. Gracias a su revestimiento antiadherente, los accesorios de OpraSculpt son una buena solución, ya que no dejan marcas del instrumental sobre el material. Existen accesorios especiales para minimizar el riesgo de que quede aire atrapado en el composite durante la aplicación. En definitiva, diseñar una superficie homogénea es fundamental para lograr resultados estéticos.



Modelado con OpraSculpt Pad



Resultado final

**Las escalas de referencia en el mango del instrumento** ayudan al profesional a lograr restauraciones estéticas y con forma anatómica natural. Las escalas de referencia en el mango del instrumento permiten comparar fácilmente el ancho promedio de los dientes y la alineación de los ejes, por ejemplo, en los dientes anteriores superiores.



Escala de referencia 1



Escala de referencia 2

Fotografías: cortesía de Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

# Modelado eficaz para el éxito a largo plazo

Además de otros factores, el modelado afecta en gran medida al éxito a largo plazo del tratamiento, ya que la forma anatómica de la restauración es fundamental para la salud global del aparato masticador. La forma de los accesorios y el ángulo de trabajo de los instrumentos OptraSculpt Pad y OptraSculpt están especialmente diseñados para adaptarse a las superficies anteriores y posteriores. Unas crestas de los bordes proximales correctamente diseñadas facilitan la limpieza de los espacios interdientales. Asimismo, las suaves superficies de la restauración minimizan la acumulación de placa y los bordes, creados con esmero, reducen la aparición de caries secundarias.



## OptraSculpt para la región posterior



**Esfera**  
Adaptación de los  
composites



**Punta**  
Modelado profesional  
de fisuras



**Cinzel**  
Modelado de crestas de  
los bordes proximales



# Adaptación más sencilla gracias al efecto antiadherente

---

Los innovadores accesorios de dos elementos le permiten lograr restauraciones de aspecto natural con poco esfuerzo. El efecto antiadherente de los accesorios evita que los instrumentos se adhieran al composite. La adaptación del composite es muy fácil, ya que los instrumentos no dejan marcas en el material.



Fotografías: cortesía del Dr. Ronny Watzke, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein

**OptraSculpt Pad**  
Adaptación  
homogénea en  
la región anterior

## Requiere menos esfuerzo para el acabado y el pulido

---

El resultado de modelado homogéneo y sin marcas le permite agilizar el proceso de acabado y pulido y reduce el tiempo necesario para completar la restauración.

# OptraPol®

## Pulido eficiente de restauraciones de composite

---

Los pulidores OptraPol utilizan microcristales de diamante. Son especialmente adecuados para pulir todos los tipos comunes de restauraciones de composite.



# Superficies brillantes en un solo paso


OptraPol proporciona un hermoso brillo natural a las restauraciones de composite altamente estéticas. El alto contenido de diamante de más del 70 % en peso garantiza resultados excelentes.



Fotografías: cortesía del Dr. M. Dieter, el Dr. A. Peschke y el Dr. L. Enggist, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein


Las restauraciones adquieren un elevado nivel de brillo en pocos segundos y en un único paso.

Brillo de la superficie (unidades de brillo)

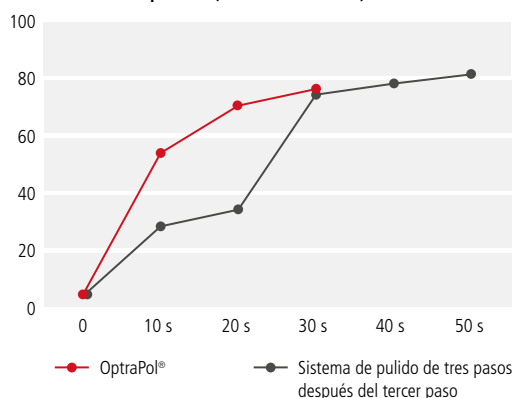

El pulidor OptraPol logra mejores resultados que los sistemas de pulido de tres pasos convencionales en menos tiempo y en un solo paso. Las superficies presentan un acabado liso y uniforme, lo que evita la acumulación de placa.

Rugosidad de la superficie (µm)

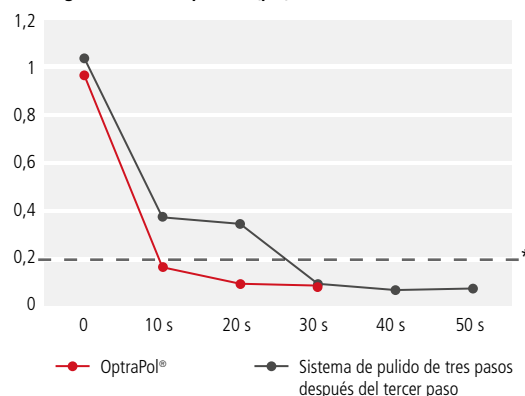

\* valor umbral clínicamente significativo (Bollen, C. M. et al, 1997)

Referencias: *In-vitro* test of competitive polishing systems; composite: Tetric EvoCeram® (Dr. S. Heintze, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2009)

Bibliografía: Bollen, C. M., Lambrechts, P. y Quirynen, M. (1997). Comparison of surface roughness of oral hard materials to the threshold surface roughness for bacterial plaque retention: a review of the literature. *Dent Mater*, 13(4), 258-269.

# Formas de suministro

---

## OptraGate

<b>Assortment</b> 40 x Tamaño R (regular) 40 x Tamaño S (pequeño)	577275WW
<b>Refill R</b> 80 x Tamaño R (regular)	590850WW
<b>Refill S</b> 80 x Tamaño S (pequeño)	590851WW
<b>Refill Junior</b> 80 x Tamaño Junior	591451WW
<b>Refill R</b> 40 x Tamaño R (regular)	683377WW
<b>Refill S</b> 40 x Tamaño S (pequeño)	683378WW
<b>Refill Junior</b> 40 x Tamaño Junior	683376WW

## OptraGate en azul y rosa

<b>Starter Kit/ azul y rosa</b> 4 x Tamaño Junior azul 4 x Tamaño Junior rosa 4 x Tamaño S (pequeño) azul 4 x Tamaño S (pequeño) rosa	669087WW
<b>Small Assortment/ azul y rosa</b> 20 x Tamaño S (pequeño) azul 20 x Tamaño S (pequeño) rosa	669088WW
<b>Junior Assortment/ azul y rosa</b> 20 x Tamaño Junior azul 20 x Tamaño Junior rosa	669089WW

## OptraDam Plus

<b>Assortment</b> 25 x Tamaño R (regular) 25 x Tamaño S (pequeño)	627401AN
<b>Refill R</b> 50 x Tamaño R (regular)	627399AN
<b>Refill S</b> 50 x Tamaño S (pequeño)	627400AN



## OptraSculpt Pad

<b>Assortment</b>	639791AN
1 x Instrumento de un cabezal 1 x Refill almohadillas 4 mm / 60 1 x Refill almohadillas 6 mm / 60	
<b>OptraSculpt Pad Refill 4mm/ 60</b>	639792AN
Almohadillas 4 mm	
<b>OptraSculpt Pad Refill 6 mm / 60</b>	639793AN
Almohadillas 6 mm	
<b>OptraSculpt Pad instrument Refill</b>	646004AN
Instrumento de un cabezal	

## OptraSculpt

<b>OptraSculpt y OptraSculpt Pad System Kit</b>	683066AN
1 x Instrumento de un cabezal 1 x Instrumento de dos cabezales 1 x Refill almohadillas 4 mm / 60 1 x Refill puntas de modelado (esfera) / 20 1 x Refill puntas de modelado (cincel) / 20 1 x Refill puntas de modelado (punta) / 20	
<b>OptraSculpt Starter Kit</b>	683067AN
1 x Instrumento de dos cabezales 1 x Refill puntas de modelado (esfera) / 20 1 x Refill puntas de modelado (cincel) / 20 1 x Refill puntas de modelado (punta) / 20	
<b>OptraSculpt Next Generation Refill Esfera / 60</b>	683068AN
Punta de modelado: esfera	
<b>OptraSculpt Next Generation Refill Cincel / 60</b>	683069AN
Punta de modelado: cincel	
<b>OptraSculpt Next Generation Refill Punta / 60</b>	683100AN
Punta de modelado: punta puntiaguda	
<b>Instrumento OptraSculpt Refill</b>	683154AN
Instrumento de dos cabezales	

## OptraPol

<b>Assortment</b>	634464
6 x Pulidores llama pequeña 6 x Pulidores llama grande 4 x Pulidores copa 4 x Pulidores lente	
<b>Refill polishers small flame (llama pequeña)</b>	634458
<b>Refill polishers large flame (llama grande)</b>	634461
<b>Refill polishers cup (copa)</b>	634459
<b>Refill polishers lens (lente)</b>	634460

## OptraFine

<b>Assortment</b>	601989AN
2 x Llama F (acabado) 2 x Llama P (pulidor) 2 x Copa F 2 x Copa P 2 x Disco F 2 x Disco P 1 x Pasta de pulido 6 x Cepillos de nylon	
<b>Refill polishers small flame (llama pequeña)</b>	634458
<b>Refill polishers large flame (llama grande)</b>	634461
<b>Refill polishers cup (copa)</b>	634459
<b>Refill polishers lens (lente)</b>	634460

## OptraStick

<b>Refill 48 unidades</b>	616200AN
---------------------------	----------

**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**Ivoclar Vivadent S.L.U.**  
Carretera de Fuencarral nº24  
Portal 1 – Planta Baja  
28108-Alcobendas (Madrid)  
España  
Telf. +34 91 375 78 20  
Fax +34 91 375 78 38  
[www.ivoclarvivadent.es](http://www.ivoclarvivadent.es)

ES/2018-11-27



**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation