


## Auswahl-Menü

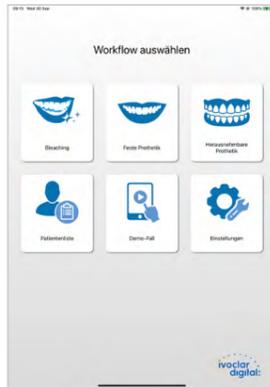

### Menü zur Auswahl von:

- Behandlungsziel:
  - Bleaching
  - Festsitzende Prothetik
  - Herausnehmbare Prothetik
- Patientenliste
- Demo-Fall zum Ausprobieren
- Einstellungen
  - Sprache
  - Häufig gestellte Fragen – FAQ
  - rechtliche Informationen



### Patientendaten

#### ... zu Beginn eingeben:

- Neuen Patienten anlegen
- Bestehenden Patienten öffnen


#### ... später hinzufügen:

- Machen Sie ein Bild
- Bild hochladen

#### Bild hochladen

- Bild aus Ordner Fotos öffnen

## Aufnahme von Einzelbildern

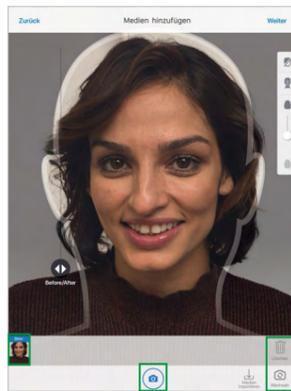

### Optimaler Abstand zwischen iPad/iPhone und Patient:

- Gesicht stimmt mit der Kopfschablone überein
- Die Aufnahme mehrerer Einzelbilder ist möglich.

### Hinweis:


- Bitte Rückkamera verwenden (höhere Auflösung)
- Auf ausreichende Helligkeit achten. Bitte frontale, helle Lichtquelle für optimale Beleuchtung verwenden.
- Die Kopfschablone verschwindet, sobald das Gesicht erkannt wird

Silhouetten-Modus ein/aus

Wechsel Front/Rückkamera

Einzelne Aufnahmen löschen

## Aufnahme von Bildsequenzen (optional)

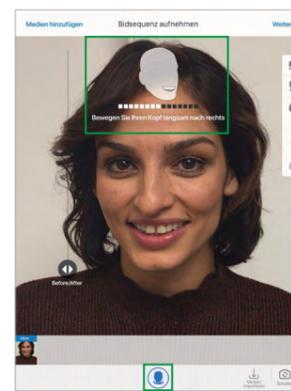

- Bildsequenzen ermöglichen die Aufnahme des Kopfes in einer Links-Rechts-Bewegung.
- Die Aufnahmen starten automatisch, sobald eine Kopfbewegung erkannt wird.

### Wichtig:

- Die Sequenzaufnahmen werden für den Import in das 3Shape Dental System benötigt.\*



Aufnahme neuer Sequenz starten

## Bild-Aufnahmen in der Übersicht



- Übersicht aller Einzelbilder und Bildsequenzen
- Import zusätzlicher Bilder möglich



Medien importieren (Bilder)

## Zahnform auswählen



### „Natural“ – natürliche Zahnformen

- „Anteriores“ von Dr. Jan Hajtó für eine natürliche „unperfekte“ Ästhetik




### „Denture“ – Zahnformen

- Für herausnehmbaren Zahnersatz oder ästhetische Zahnformen in optimaler Aufstellung
- Enthält ästhetische Zahnlinien von Ivoclar Vivadent
  - SR Phonares® II
  - SR Vivodent® S PE / S DCL (16)



Zahnformen-Favoriten festlegen

## Zähne ausrichten

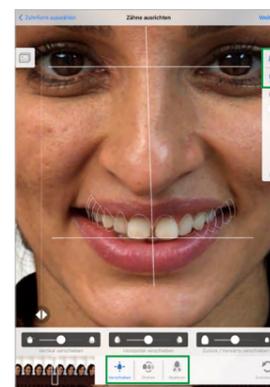

- Position der virtuellen Zähne verschieben
- Links/rechts
  - Hoch/runter
  - Vor /zurück



Rotation der virtuellen Zähne



Zahnbogen vergrößern/verkleinern



Silhouetten-Modus ein/aus



Gesichts-Referenzlinien ein-/ausblenden



Zurücksetzen: alle Aufnahmen und Anpassungen löschen

## Zahngeometrie anpassen



Kieferbreite anpassen „bukkaler Korridor“



Frontzähne in der Breite anpassen



Individuelle Anpassungen der virtuellen Zähne und der Gingiva



### Hinweis:

- Mit zwei Fingern in das Bild hineinzoomen



- Finger oder geeigneten Eingabestift als Zeichenstift verwenden


\*für den Import von Bildsequenzen in das 3Shape Dental System ist das „IvoSmile-Add-on“ notwendig

## Farbe anpassen (Zähne, Gingiva)



- Farb- und Helligkeitseinstellungen für virtuelle Zähne und Gingiva
- Bleaching der Unterkieferzähne

## Vorschau

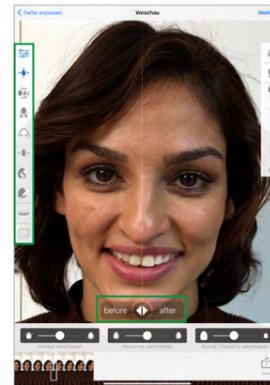

- Vorschau des neuen Lächelns, im Vorfeld der Echtzeit-3D-Visualisierung am Patienten
- Über das Seitenmenü können direkte Anpassungen von Zahnauswahl bis Zahnfarbe vorgenommen werden.
- Über das Seitenmenü können alle bisherigen Prozessschritte nochmals direkt aufgerufen werden.

Schieberegler von links nach rechts bewegen zur Vorher-/Nachher-Ansicht


## Live-Modus



- 3D-Echtzeitvisualisierung des neuen Lächelns direkt im Mund der Patientin oder des Patienten

Start der Live-Visualisierung

## Projekt/Fall speichern

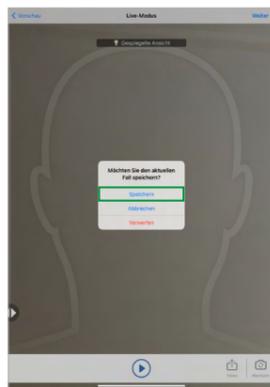


„Speichern“ auswählen um aktuellen Fall zu speichern

- Patientendaten eingeben
- Projektdetails eingeben
- Notizen hinzufügen



## Aktuelles Bild / Screenshot versenden

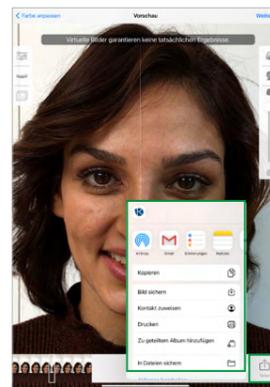

Bildschirmfoto versenden oder speichern


**Hinweis:**

- Bild wird mit einer Information verschickt, dass es sich um einen unverbindlichen Vorschlag handelt.

**Empfehlung:**

- Immer ein Projekt anlegen, um die aktuelle Visualisierung und die Bilder zu speichern

## Patientenfall exportieren


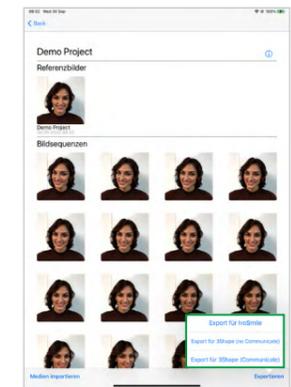


**Exportmöglichkeiten von Patientenfällen**

- **Export für IvoSmile**  
Senden von Fällen an weitere IvoSmile-Anwender
- **Export für 3Shape (ohne 3Shape Communicate)**  
Versenden der Fälle über File-Sharing-Programme an das 3Shape Dental System\*
- **Export für 3Shape (mit 3Shape Communicate)**  
Versenden der Fälle über 3Shape-Communicate-Server an das 3Shape Dental System\*





## 3Shape-Fall importieren\*

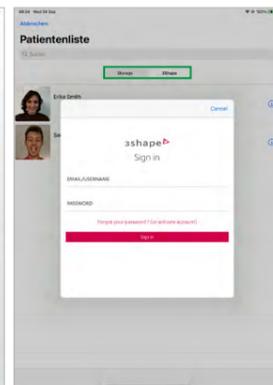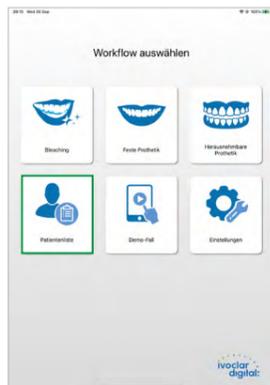

Im Start-Menü „Workflow auswählen“ die Option „Patientenliste“ wählen.



## Einstellungen

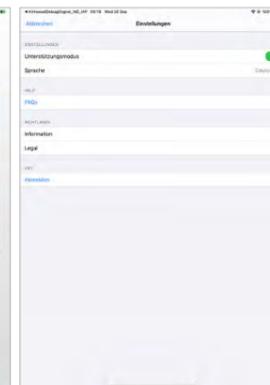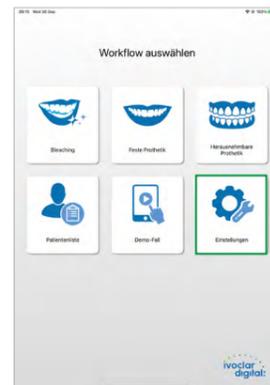

Kommunikations- und Beratungs-Software für dentales Fachpersonal, basierend auf „Augmented Reality“-Technologie.

Erhältlich im Apple App Store. Kompatibel mit iPad und iPhone (Modelle ab 2015)



\* Für den Import von Daten aus dem 3Shape Dental System ist das IvoSmile-Add-on notwendig