

Programat® – Brennprogrammtabelle °C

Version: 7; Ausgabedatum: 2017-07

Ivoclar Vivadent Programmtabelle		Werte in °C		B	S	t†	T	H	V1	V2	L	tL	↘	↗
				Bereitsch. temp. [°C]	Schliesszeit [mm:ss]	Temperatur- anstieg [°C]	Haltezeit [°C]	Haltezeit [mm:ss]	Vakuum ein [°C]	Vakuum aus [°C]	Langzeit-abkühlung [°C]	Abkühlgradient [°C]	[°C]	[mm:ss]
Wertebereiche für alle Programme		MIN	100	00:18	10 (30)	100	00:00	0	0	0	0	0	0	00:00
		MAX	700	30:00	140	1200	60:00	1200	1201	1200	50	700	60:00	
Materialgruppe	P.Nr.													
IPS Style	1	1. / 2. Opaquer-Brand 870	m.V.	403	04:00	100	870	01:00	450	869	0	0	0	0
	2	1. / 2. Margin-Brand	m.V.	403	06:00	60	840	01:30	450	839	0	0	0	0
	3	1. Dentin / Incisal-Brand / One-Brand	m.V.	403	06:00	60	790	01:00	450	779	0	0	0	0
	4	2. Dentin / Incisal-Brand / One-Brand	m.V.	403	06:00	60	780	01:00	450	779	0	0	0	0
	5	Malfarbenbrand	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	0	0	0	0
	6	Glanzbrand / Add-On mit Glanzbrand	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	0	0	0	0
	7	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	60	690	01:00	450	689	0	0	0	0
	8	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	9	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	10	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS InLine	11	1. / 2. Pulveropaquer-Brand	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	0	0	0	0
	12	1. / 2. Pastenopaquer-Brand	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	0	0	0	0
	13	1. / 2. Margin-Brand	m.V.	403	04:00	60	930	01:00	450	929	0	0	0	0
	14	1. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	0	0	0	0
	15	2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	0	0	0	0
	16	Malfarbenbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	0	0	0	0
	17	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0
	18	Glanzbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	0	0	0	0
	19	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0
	20	Add-On 690°C pure	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	0	0	0	0
IPS Empress Esthetic + CAD	21	1. Washbrand	m.V.	403	04:00	60	840	02:00	450	839	0	0	0	0
	22	1. / 2. Incisal-Brand	m.V.	403	04:00	60	830	02:00	450	829	0	0	0	0
	23	Universal Shade / Stains	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	0	0	0	0
	24	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	25	Universal Glasur	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	0	0	0	0
	26	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	27	Add-On	m.V.	403	04:00	60	770	02:00	450	769	0	0	0	0
	28	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	29	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	30	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max Press Maltechnik	31	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	0	0	0	0
	32	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	33	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	0	0	0	0
	34	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	35	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	0	0	0	0
	36	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	37	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	38	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	39	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	40	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max Press Schichttechnik	41	Washbrand (Foundation)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	42	Washbrand Charakterisierung	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	43	1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	44	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0
	45	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	46	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0
	47	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	48	Add-On mit Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0
	49	Add-On mit Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	50	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	0	0	0	0
IPS e.max ZirPress Maltechnik	51	ZirLiner vor Wax-up + Pressen	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	0	0	0	0
	52	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	0	0	0
	53	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	54	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	0	0	0
	55	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	56	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	0	0	0
	57	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	58	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	59	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	60	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max ZirPress Schichttechnik	61	ZirLiner vor Wax-up + Pressen	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	0	0	0	0
	62	Washbrand (Foundation)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	63	1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	64	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	65	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	66	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	67	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	68	Add-On mit Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	69	Add-On mit Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	70	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	0	0	0
IPS e.max ZirCAD + Ceram	71	ZirLiner-Brand	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	0	0	0	0
	72	1. / 2. Margin-Brand	m.V.	403	04:00	40	800	01:00	450	799	0	0	0	0
	73	Washbrand, 1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	0	0	0	0
	74	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	75	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	76	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	77	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	78	Add-On mit Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	79	Add-On mit Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	80	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	0	0	0

Gültig ab Software:
P300/G2: V8.1, P500/G2: V8.1,
P700/G2: V8.1, EP 3000/G2: V8.1,
EP 5000/G2: V8.1

Ivoclar Vivadent Programmtabelle		Werte in °C		B	S	t†	T	H	V1	V2	L	tL	S	S	
				Bereitsch. temp. [°C]	Schliesszeit [mm:ss]	Temperatur- anstieg [°C]	Haltezeit [°C]	Haltezeit [mm:ss]	Vakuum ein [°C]	Vakuum aus [°C]	Langzeit-abkühlung [°C]	Abkühlgradient [°C]	[°C]	[mm:ss]	
Wertebereiche für alle Programme		MIN		100	00:18	10 (30)	100	00:00	0	0	0	0	0	0	00:00
		MAX		700	30:00	140	1200	60:00	1200	1201	1200	50	700	60:00	
Materialgruppe	P.Nr.														
IPS e.max CAD Crystall/Glaze	81	Kristallisation / Glanz LT/MT/HT	m.V.	403	08:00	90 / 30	820 / 840	0:10/7:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0	0
	82	Malfarben / Korrekturbrand	m.V.	403	08:00	90 / 30	820 / 840	0:10/3:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0	0
	83	Fügen / Kristallisation CAD-on	m.V.	403	02:00	30 / 30	820 / 840	2:00/7:00	550 / 820	820 / 840	600	0	403	06:00	0
	84	Charakterisierung / Korrektur CAD-on	m.V.	403	08:00	60 / 30	820 / 840	0:10/3:00	550 / 820	820 / 840	600	0	0	0	0
	85	Speed-Krit / Spray	m.V.	403	01:00	110 / 50	800 / 850	0:00/3:00	690 / 800	800 / 850	700	40	480	02:00	0
	86	Kristallisation MO/LT/MT/HT	m.V.	403	08:00	60 / 30	770 / 850	0:10/10:00	550 / 770	770 / 850	700	0	0	0	0
	87	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	88	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	89	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	90	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD Maltechnik	91	Kristallisation / Glanz LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	820 / 840	0:10/7:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0	0
	92	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	0	0	0	0	0
	93	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
	94	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	0	0	0	0	0
	95	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
	96	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	0	0	0	0	0
	97	Kristallisation MO/LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	770 / 850	0:10/10:00	550 / 770	770 / 850	700	0	0	0	0
	98	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	99	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	100	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD Schichttechnik	101	Kristallisation Imp/MO/LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	770 / 850	0:10/10:00	550 / 770	770 / 850	700	0	0	0	0
	102	Kristallisation / Glanz LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	820 / 840	0:10/7:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0	0
	103	Washbrand (Foundation)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0	0
	104	1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0	0
	105	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0	0
	106	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
	107	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0	0
	108	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
	109	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	0	0	0	0	0
	110	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS InLine PoM	111	1. / 2. Pulveropaquer-Brand	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	0	0	0	0	0
	112	1. / 2. Pastenopaquer-Brand	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	0	0	0	0	0
	113	Touch Up-Brand	m.V.	403	04:00	60	840	01:00	450	839	0	0	0	0	0
	114	Malfarbenbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	0	0	0	0	0
	115	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
	116	Glanzbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	800	02:00	450	799	0	0	0	0	0
	117	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
	118	Add-On nach Glanz-Brand 690°C	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	0	0	0	0	0
	119	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	120	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS InLine One	121	1. / 2. Pulveropaquer-Brand	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	0	0	0	0	0
	122	1. / 2. Pastenopaquer-Brand	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	0	0	0	0	0
	123	1. Dentical-Brand	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	0	0	0	0	0
	124	2. Dentical-Brand	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	0	0	0	0	0
	125	Malfarbenbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	0	0	0	0	0
	126	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0	0
	127	Glanzbrand InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	0	0	0	0	0
	128	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0	0
	129	Add-On nach Glanz-Brand 690°C	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	0	0	0	0	0
	130	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS d.SIGN	131	1. Opaquer-Brand Wash	m.V.	403	06:00	80	900	01:00	450	899	0	0	0	0	0
	132	2. Opaquer-Brand	m.V.	403	06:00	80	890	01:00	450	889	0	0	0	0	0
	133	1. / 2. Margin-Brand	m.V.	403	06:00	60	890	01:00	450	889	0	0	0	0	0
	134	1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	403	07:00	60	870	01:00	450	869	0	0	0	0	0
	135	Malfarbenbrand d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0	0
	136	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	0	0	0	0	0
	137	Glanzbrand d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0	0
	138	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	0	0	0	0	0
	139	Add-On Mix 1:1	m.V.	403	04:00	60	810	01:00	450	809	0	0	0	0	0
	140	Add-On	m.V.	403	04:00	60	750	01:00	450	749	0	0	0	0	0
IPS e.max ZirCAD Maltechnik	141	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	450	0	0	0	0
	142	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	450	0	0	0	0
	143	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	144	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	145	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	146	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	147	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	148	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	149	Individuell	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	150	Regenerierungsbrand	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	0	0	750	25	0	0	0

Informationen zu den individuellen Programmen finden Sie im Kapitel 5.3 der Bedienungsanleitung.

P.Nr. 41, 42, 43, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 97, 101, 102, 103, 104: 2-stufiges Programm

*Nur im Programmat P300, P500 und P700

m.V. = mit Vakuum
o.V. = ohne Vakuum

Gültig ab Software:
P300/G2: V8.1, P500/G2: V8.1,
P700/G2: V8.1, EP 3000/G2: V8.1,
EP 5000/G2: V8.1

Programat® – Brennprogrammtabelle °F

Version: 7; Ausgabedatum: 2017-07

Gültig ab Software:

P300/G2: V8.1, P500/G2: V8.1,
P700/G2: V8.1, EP 3000/G2: V8.1,
EP 5000/G2: V8.1

Ivoclar Vivadent Programmtabelle		Werte in °F		B	S	t ^f	T	H	V1	V2	L	tL	↻		
				Bereitsch. temp. [°F]	Schliesszeit [mm:ss]	Temperatur- anstieg [°F]	Haltemp. [°F]	Haltezeit [mm:ss]	Vakuum ein [°F]	Vakuum aus [°F]	Langzeit-abkühlung [°F]	Abkühlgradient [°F]	[°F]	[mm:ss]	
Wertebereiche für alle Programme		MIN	MAX	212	00:18	18 (54)	212	00:00	0	0	0	0	0	0	00:00
		1292	30:00	252	2192	60:00	2192	2194	2192	90	1292	60:00			
Materialgruppe	P.Nr.														
IPS Style	1	1. / 2. Opaquer-Brand 870	m.V.	757	04:00	180	1598	01:00	842	1596	0	0	0	0	0
	2	1. / 2. Margin-Brand	m.V.	757	06:00	108	1544	01:30	842	1542	0	0	0	0	0
	3	1. Dentin / Incisal-Brand / One-Brand	m.V.	757	06:00	108	1454	01:00	842	1452	0	0	0	0	0
	4	2. Dentin / Incisal-Brand / One-Brand	m.V.	757	06:00	108	1436	01:00	842	1434	0	0	0	0	0
	5	Malfarbenbrand	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	0	0	0	0	0
	6	Glanzbrand / Add-On mit Glanzbrand	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	0	0	0	0	0
	7	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	757	06:00	108	1274	01:00	842	1272	0	0	0	0	0
	8	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	9	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	10	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS InLine	11	1. / 2. Pulveropaquer-Brand	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	0	0	0	0	0
	12	1. / 2. Pastenopaquer-Brand	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	0	0	0	0	0
	13	1. / 2. Margin-Brand	m.V.	757	04:00	108	1706	01:00	842	1704	0	0	0	0	0
	14	1. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	0	0	0	0	0
	15	2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	0	0	0	0	0
	16	Malfarbenbrand InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	0	0	0	0	0
	17	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0	0
	18	Glanzbrand InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	0	0	0	0	0
	19	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0	0
	20	Add-On 690°C pure	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	0	0	0	0	0
IPS Empress Esthetic + CAD	21	1. Washbrand	m.V.	757	04:00	108	1544	02:00	842	1542	0	0	0	0	0
	22	1. / 2. Incisal-Brand	m.V.	757	04:00	108	1526	02:00	842	1524	0	0	0	0	0
	23	Universal Shade / Stains	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	0	0	0	0	0
	24	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	25	Universal Glasur	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	0	0	0	0	0
	26	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	27	Add-On	m.V.	757	04:00	108	1418	02:00	842	1416	0	0	0	0	0
	28	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	29	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	30	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max Press Maltechnik	31	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0	0
	32	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	33	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0	0
	34	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	35	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	0	0	0	0	0
	36	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	37	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	38	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	39	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	40	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max Press Schichttechnik	41	Washbrand (Foundation)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	42	Washbrand Charakterisierung	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	43	1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	44	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0	0
	45	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	46	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0	0
	47	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	48	Add-On mit Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0	0
	49	Add-On mit Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	50	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	0	0	0	0	0
IPS e.max ZirPress Maltechnik	51	ZirLiner vor Wax-up + Pressen	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	0	0	0	0	0
	52	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	842	0	0	0	0
	53	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	54	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	842	0	0	0	0
	55	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	56	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	0	0	0	0
	57	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	58	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	59	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	60	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max ZirPress Schichttechnik	61	ZirLiner vor Wax-up + Pressen	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	0	0	0	0	0
	62	Washbrand (Foundation)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	63	1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	64	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	65	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	66	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	67	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	68	Add-On mit Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	69	Add-On mit Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	70	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	0	0	0	0
IPS e.max ZirCAD + Ceram	71	ZirLiner-Brand	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	0	0	0	0	0
	72	1. / 2. Margin-Brand	m.V.	757	04:00	72	1472	01:00	842	1470	0	0	0	0	0
	73	Washbrand, 1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	757	04:00	72	1382	01:00	842	1380	0	0	0	0	0
	74	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	75	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	76	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	77	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	78	Add-On mit Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	79	Add-On mit Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	80	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	0	0	0	0

Ivoclar Vivadent Programmtabelle		Werte in °F		B	S	t†	T	H	V1	V2	L	tL	S	S	
				Bereitsch. temp. [°F]	Schliesszeit [mm:ss]	Temperatur- anstieg [°F]	Haltezeit. [°F]	Haltezeit [mm:ss]	Vakuum ein [°F]	Vakuum aus [°F]	Langzeit-abkühlung [°F]	Abkühlgradient [°F]	[°F]	[mm:ss]	
Wertebereiche für alle Programme		MIN		212	00:18	18 (54)	212	00:00	0	0	0	0	0	0	00:00
		MAX		1292	30:00	252	2192	60:00	2192	2194	2192	90	1292	60:00	
Materialgruppe	P.Nr.														
IPS e.max CAD Crystall/Glaze	81	Kristallisation / Glanz LT/MT/HT	m.V.	757	08:00	162 / 54	1508 / 1544	0:10/7:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1292	0	0	0	0
	82	Malfarben / Korrekturbrand	m.V.	757	08:00	162 / 54	1508 / 1544	0:10/3:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1292	0	0	0	0
	83	Fügen / Kristallisation CAD-on	m.V.	757	02:00	54 / 54	1508 / 1544	2:00/7:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1112	0	757	06:00	0
	84	Charakterisierung / Korrektur CAD-on	m.V.	757	08:00	108 / 54	1508 / 1544	0:10/3:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1112	0	0	0	0
	85	Speed-Krit / Spray	m.V.	757	01:00	198 / 90	1472 / 1562	0:00/3:00	1274 / 1472	1472 / 1562	1292	72	896	02:00	0
	86	Kristallisation MO/LT/MT/HT	m.V.	757	08:00	108 / 54	1418 / 1562	0:10/10:00	1022 / 1418	1418 / 1562	1292	0	0	0	0
	87	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	88	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	89	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	90	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD Maltechnik	91	Kristallisation / Glanz LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1508 / 1544	0:10/7:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1292	0	0	0	0
	92	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0	0
	93	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	94	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0	0
	95	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	96	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	0	0	0	0	0
	97	Kristallisation MO/LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1418 / 1562	0:10/10:00	1022 / 1418	1418 / 1562	1292	0	0	0	0
	98	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	99	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	100	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD Schichttechnik	101	Kristallisation Imp/MO/LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1418 / 1562	0:10/10:00	1022 / 1418	1418 / 1562	1292	0	0	0	0
	102	Kristallisation / Glanz LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1508 / 1544	0:10/7:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1292	0	0	0	0
	103	Washbrand (Foundation)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	104	1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	105	Malfarbenbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0	0
	106	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	107	Glanzbrand e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0	0
	108	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	109	Add-On nach Glanzbrand	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	0	0	0	0	0
	110	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS InLine PoM	111	1. / 2. Pulveropaquer-Brand	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	0	0	0	0	0
	112	1. / 2. Pastenopaquer-Brand	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	0	0	0	0	0
	113	Touch Up-Brand	m.V.	757	04:00	108	1544	01:00	842	1542	0	0	0	0	0
	114	Malfarbenbrand InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	0	0	0	0	0
	115	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	116	Glanzbrand InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	02:00	842	1470	0	0	0	0	0
	117	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	118	Add-On nach Glanz-Brand 690°C	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	0	0	0	0	0
	119	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	120	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS InLine One	121	1. / 2. Pulveropaquer-Brand	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	0	0	0	0	0
	122	1. / 2. Pastenopaquer-Brand	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	0	0	0	0	0
	123	1. Dentisal-Brand	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	0	0	0	0	0
	124	2. Dentisal-Brand	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	0	0	0	0	0
	125	Malfarbenbrand InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	0	0	0	0	0
	126	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0	0
	127	Glanzbrand InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	0	0	0	0	0
	128	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0	0
	129	Add-On nach Glanz-Brand 690°C	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	0	0	0	0	0
	130	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS d.SIGN	131	1. Opaquer-Brand Wash	m.V.	757	06:00	144	1652	01:00	842	1650	0	0	0	0	0
	132	2. Opaquer-Brand	m.V.	757	06:00	144	1634	01:00	842	1632	0	0	0	0	0
	133	1. / 2. Margin-Brand	m.V.	757	06:00	108	1634	01:00	842	1632	0	0	0	0	0
	134	1. / 2. Dentin / Incisal-Brand	m.V.	757	07:00	108	1598	01:00	842	1596	0	0	0	0	0
	135	Malfarbenbrand d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0	0
	136	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	0	0	0	0	0
	137	Glanzbrand d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0	0
	138	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	0	0	0	0	0
	139	Add-On Mix 1:1	m.V.	757	04:00	108	1490	01:00	842	1488	0	0	0	0	0
	140	Add-On	m.V.	757	04:00	108	1382	01:00	842	1380	0	0	0	0	0
IPS e.max ZirCAD Maltechnik	141	Malfarbenbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	142	Glanzbrand Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	143	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	144	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	145	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	146	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	147	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	148	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	149	Individuell	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	150	Regenerierungsbrand	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	0	0	1382	45	0	0	0

Informationen zu den individuellen Programmen finden Sie im Kapitel 5.3 der Bedienungsanleitung.

P.Nr. 41, 42, 43, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 97, 101, 102, 103, 104: 2-stufiges Programm

*Nur im Programmat P300, P500 und P700

m.V. = mit Vakuum
o.V. = ohne VakuumGültig ab Software:
P300/G2: V8.1, P500/G2: V8.1,
P700/G2: V8.1, EP 3000/G2: V8.1,
EP 5000/G2: V8.1