


Plaque Test

Líquido revelador fluorescente

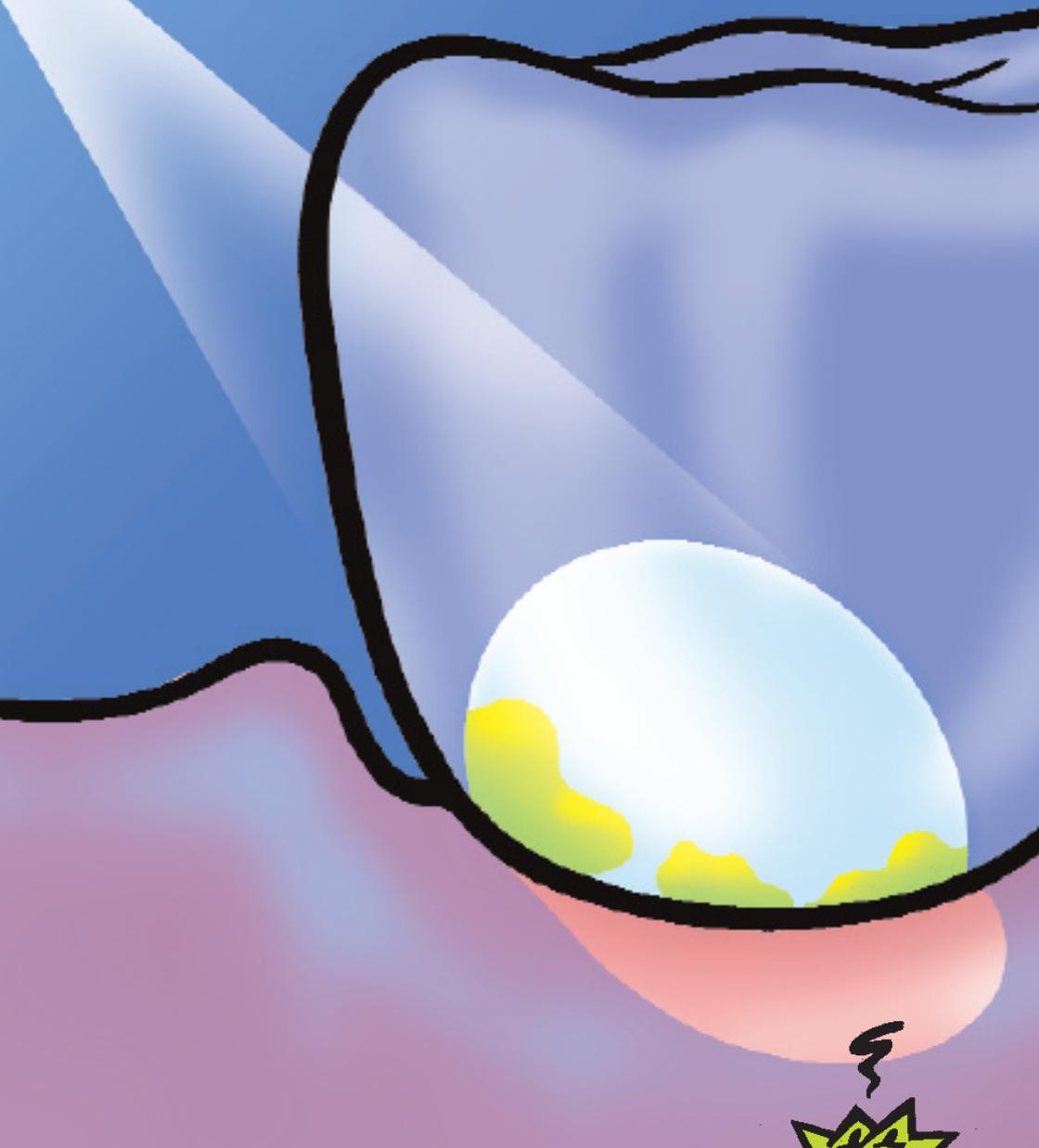

Hace la placa visible


ivoclar
vivadent®

Plaque Test

Convincente solución para la visualización de placa

Visible

Con la luz de polimerización

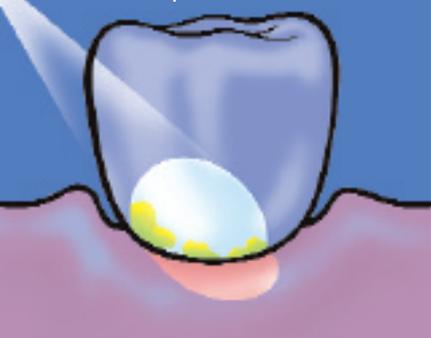

Invisible

Sin la luz de polimerización



La placa bacteriana es responsable no sólo del desarrollo de caries, sino también de enfermedad periodontal que afecta seriamente la salud de dientes y encías.

Plaque test es un líquido revelador fluorescente, para la exposición de placa.

Iluminando la placa

- Aplicar abundantemente Plaque test en las superficies de los dientes
- Hacer que el paciente se enjuague
- Iluminar los dientes con la lámpara de polimerización. Todas las zonas afectadas de placa se revelarán con un color fluorescente
- Eliminar la placa ahora visible mediante cepillado o limpieza profesional.

Ventajas

- Fluoresce bajo cualquier lámpara de polimerización
- No produce tinciones en lengua o membranas mucosas
- Fácil manipulación
- Aplicación personalizada
- Económico

Solución convincente

Plaque Test es una rápida, fácil y estética solución para:

Convencer

a sus pacientes de la necesidad de mejorar sus hábitos de higiene oral

Enseñar

a sus pacientes donde y cómo mejorar esas medidas

Proteger

a sus pacientes de lesiones de caries y enfermedad periodontal

Presentación:

1 frasco Plaque Test, 10 ml
Accesorios



Las descripciones y datos no constituyen garantía de sus propiedades.
Impreso en Austria © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
572479/0506/sp/BVD

Ivoclar Vivadent S.A.
c/Emilio Muñoz, 15
Esquina c/Albarracín
E-28037 Madrid
Spain
Tel. + 34 91 375 78 20
Fax + 34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Calle 134 No. 13-83,
Of. 520
Santafé de Bogotá
Colombia
Tel +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63

Ivoclar-Vivadent S.A. de C.V.
Av. Mazatlán No. 61, Piso 2
Col. Condesa
06170 México, D.F.
Mexico
Tel. +52 (55) 5062-1000
Fax +52 (55) 5062-1029
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

**ivoclar
vivadent®**