



# IPS e.max® ZirCAD MT BL/LT 0

All ceramic,  
all you need.

Infiltración BASICA con los líquidos de colorear IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquids A–D

- 25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT  
Colouring Liquids (A–D)
- +  
1  IPS e.max® ZirCAD Colouring  
Liquid Indicador rojo



1

1x con pincel No. 5



2

1x con pincel No. 5



3



1x con pincel No. 5

4



1x con pincel No. 5

5



1x con pincel No. 5

6

Tiempos de secado  
antes de seguir con la  
infiltración avanzada



Pincel No. 1



Pincel No. 3



Pincel No. 5


# IPS e.max® ZirCAD MT BL/LT 0

All ceramic,  
all you need.


## Infiltración AVANZADA con los líquidos de colorear IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquids A–D

### Recomendaciones


para crear efectos de color  
con IPS e.max® ZirCAD Colouring  
Liquid Indicator:

25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT  
Colouring Liquid gris, violeta


+

1  IPS e.max® ZirCAD Colouring  
Liquid Indicator amarillo




25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT  
Colouring Liquid naranja


+

1  IPS e.max® ZirCAD Colouring  
Liquid Indicator azul



25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT  
Colouring Liquid azul

+

1  IPS e.max® ZirCAD Colouring  
Liquid Indicator azul + amarillo (= verde)



7



Aplicar gris en el área incisal y marginal para un efecto de profundidad natural

1x con pincel No. 1 o 3

8



Efectos translúcidos con azul en el área incisal

1x con pincel No. 1 o 3

9




Efectos translúcidos con violeta en el área incisal y cervical

1x con pincel No. 1 o 3

10

Tiempos de secado  
Antes de la sinterización

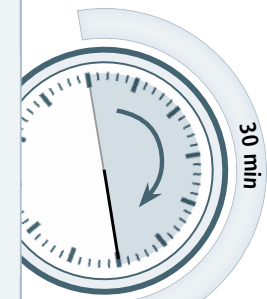

CE 0123

Rx ONLY



Fabricante:  
Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan, Liechtenstein  
[www.ivoclarvivadent.es](http://www.ivoclarvivadent.es)



ver instrucciones

Fecha de edición: 2019-03-20, Rev. 1  
ES

ivoclar  
vivadent  
passion vision innovation