


# PrograMill PM3/5/7

## PrograMill Softwareupdate - Installationsanleitung

Für die Installation eines Softwareupdates auf Ihrer PrograMill Maschine gehen sie bitte wie folgt vor:

1. Speichern Sie die aktuelle Softwareversion im Downloadbereich der Corporate Webseite auf einem leerem USB Stick. Link: <http://www.ivoclarvivadent.com/cad-cam-download-center/>
2. Stellen Sie sicher, dass alle aktiven Fräsjobs beendet sind.
3. Stecken Sie den USB-Stick mit der aktuellen Softwareversion in einen USB-Port der PrograMill Maschine.
4. Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Software-Version.

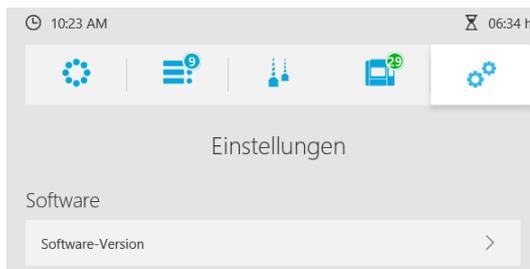

5. Wählen Sie das Update aus und tippen Sie auf den Button „Laden und Installieren“



6. Nach der erfolgreichen Installation des Updates erfolgt ein Neustart der Maschine.