



IvoSmile® Orthodontics

Where beautiful smiles begin

Exportación de los datos de 3Shape TRIOS Treatment Simulator (TTS al Portal 3Shape Communicate™

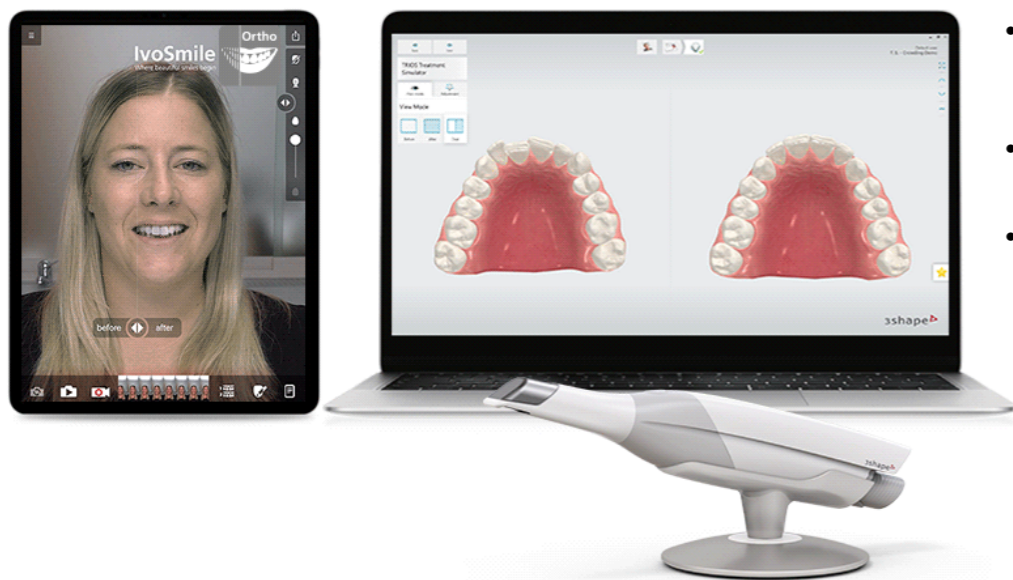

- La app IvoSmile® Orthodontics se usa en combinación con 3Shape TRIOS Treatment Simulator (TTS) y 3Shape Communicate™ Portal.
- La visualización de IvoSmile Orthodontics está limitada al maxilar.
- Es necesaria una conexión a internet.

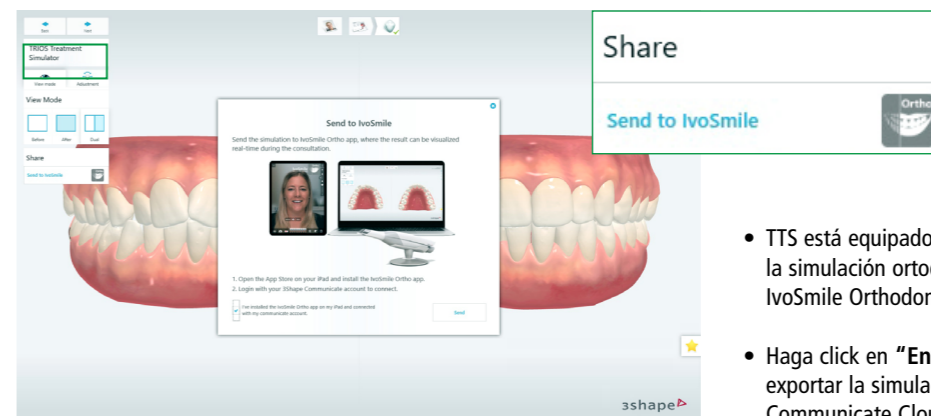


- TTS está equipado con un link directo para preparar la simulación ortodóntica para la visualización en IvoSmile Orthodontics.
- Haga click en "Enviar a IvoSmile Orthodontics" para exportar la simulación maxilar a la nube de 3Shape Communicate Cloud.


Importación de datos de 3Shape Communicate™ a la app IvoSmile® Orthodontics




➡ Abrir la app IvoSmile Orthodontics

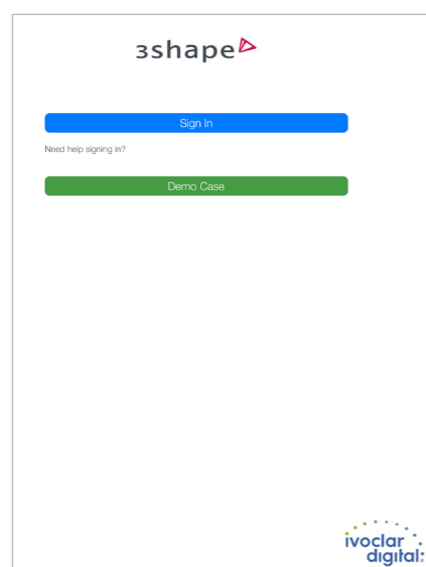


➡ Abrir la app IvoSmile Orthodontics

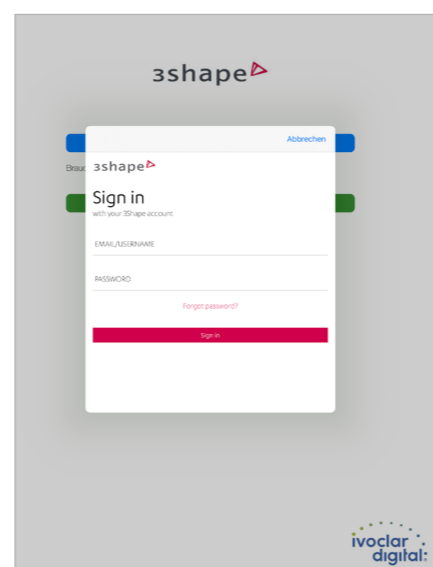


➡ Introducir los datos de usuario del Communicate Portal

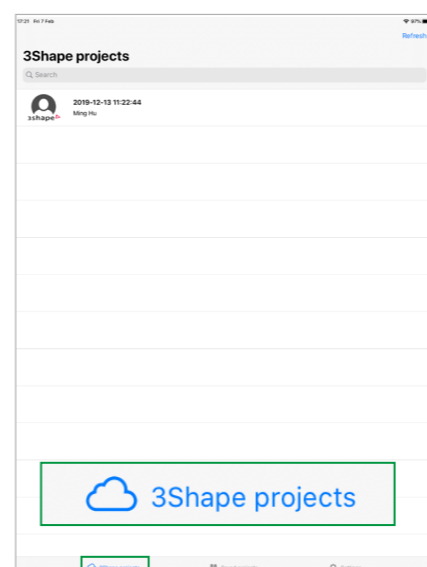

➡ Hacer click en "Proyectos 3Shape" para ver todos los TTS files en el Communicate Portal

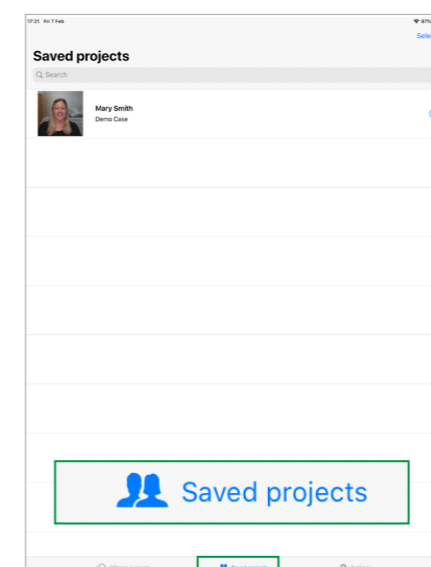

➡ Hacer click en "Proyectos guardados" para ver todos los Proyectos guardados en IvoSmile Orthodontics (guardados localmente en Apple iPad)

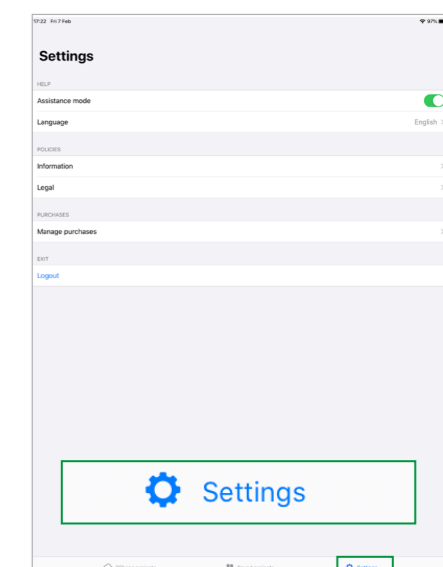


➡ Hacer click en "Ajustes" para acceder a

- Modo asistencia (on / off)
- Ajustes de idioma
- Gestión de licencia
- Y más

Visualización de una simulación ortodóntica con IvoSmile® Orthodontics


Nota : El "Asistente de imágenes" guía a los usuarios a través de la app

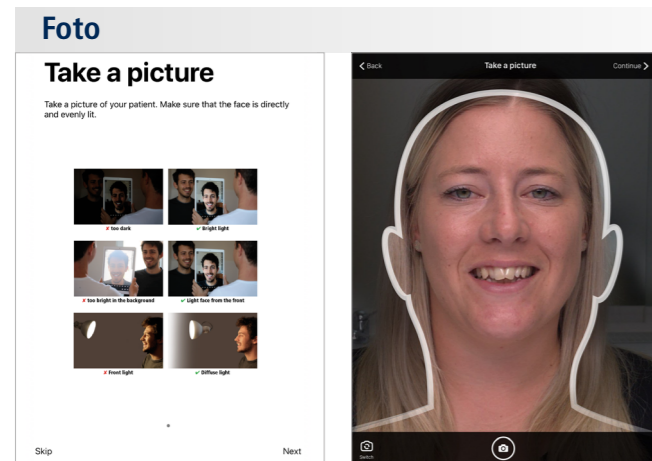

- La cara del paciente debe colocarse debidamente dentro de la plantilla (la plantilla desaparece cuando realiza el reconocimiento facial)
- Preste atención a tener buenas condiciones de luz (idealmente luminosa, luz difusa desde el frente)
- Haga una foto con la cámara posterior (de mayor resolución que la cámara frontal)




Foto del paciente

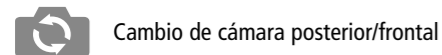

Cambio de cámara posterior/frontal




Superponga la situación dental existente con la simulación de ortodoncia:

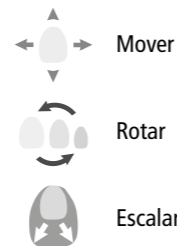

Mover

Rotar

Escalar

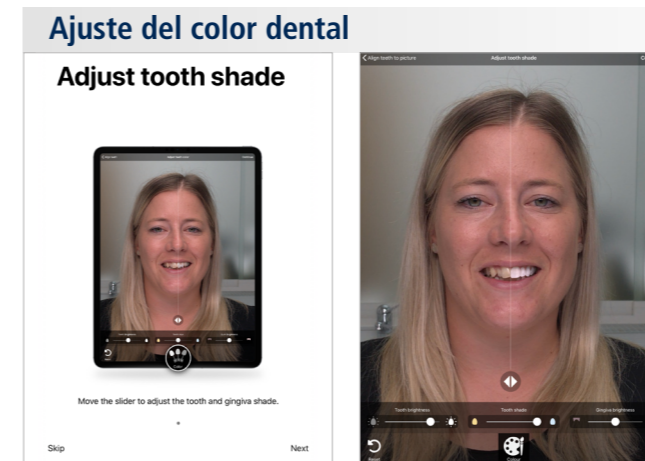

Ajustes de color y brillo de los dientes y la gingiva virtual




Visualización 3D fija o en tiempo real de la simulación de ortodoncia individual del paciente.




Actualizar diseño: adopta los ajustes realizados en TTS en IvoSmile Orthodontics



Compatir imagen: Envía imágenes/capturas al paciente o técnico dental , por ej. Por email

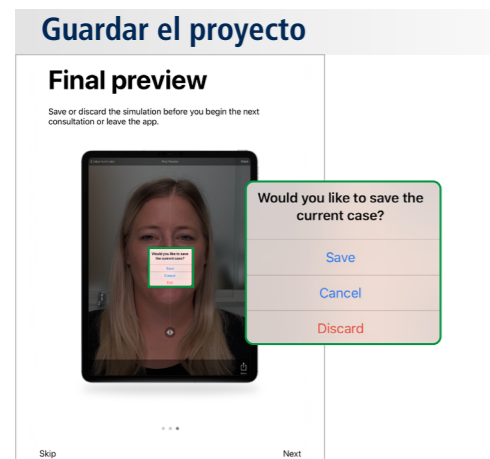

Haga click en "Guardar / Cerrar" para finalizar y guardar el proyecto actual

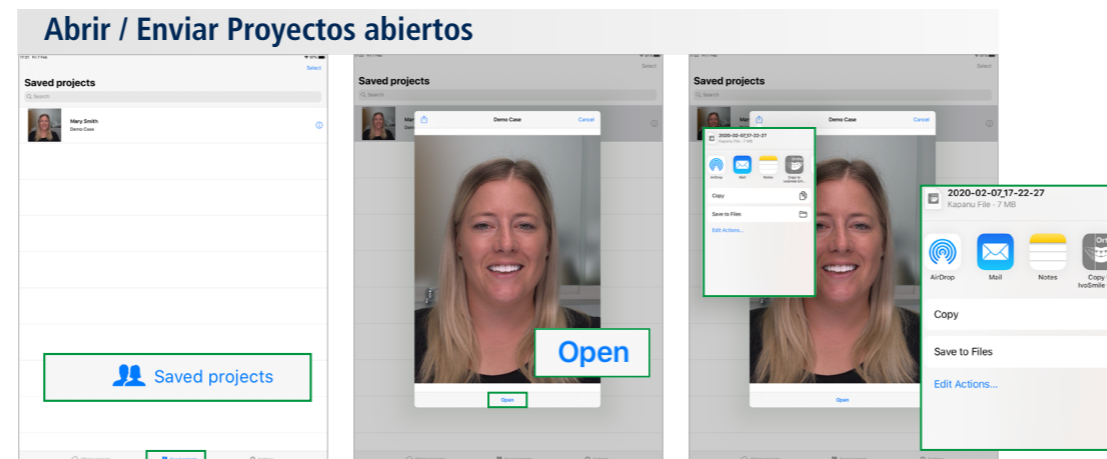

Seleccionar un Proyecto en la carpeta "Proyectos Guardados" y haga click en "Abrir" para compartir la imagen más tarde.



Compartir Proyectos guardados



Software de comunicación y consulta para profesionales dentales basado en tecnología innovadora de realidad aumentada

Disponible en Apple App Store para iPads (CPU de 64 bits) con sistema operativo iOS

