

Astropol® y Astrobrush®



El sistema de pulido para brillantes resultados



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Acabado y pulido con Astropol®

Los resultados del pulido influyen de manera decisiva en la calidad de las restauraciones.



Calidad y prevención

Las superficies dentales lisas ayudan a prevenir la acumulación de placa y la decoloración de los dientes. Por ello, cuanto mejor sea el acabado, más resistente será la superficie. El acabado con una superficie lisa es especialmente importante en restauraciones de composite. La calidad de los distintos componentes de un sistema de pulido es decisiva para lograr un acabado de superficie liso. Con los recientemente desarrollados pulidores Astropol, Ivoclar Vivadent ha emprendido un nuevo paso para asegurar la estética, incluso con aquellas restauraciones realizadas con materiales rígidos, tales como composites micro híbridos (p. ej. Tetric® Ceram) y cerómeros (p. ej. Targis®).

Innovador y comprobado

Astropol se fabrica utilizando innovadoras técnicas y materiales de fabricación en combinación con un material de silicona. Estos pulidores se caracterizan por sus excelentes resultados para el usuario y la compatibilidad con los productos de Ivoclar Vivadent.



Astropol

Astropol es un completo juego de puntas de acabado y pulido para aplicaciones oclusales e interproximales. Los pulidores están disponibles en tres grados de abrasión y cuatro formas diferentes.

Paso 1



Acabado con Astropol F

Para la eliminación del exceso de material y el pre-pulido.

Paso 2



Pulido con Astropol P

Para el pulido de restauraciones. Astropol P asegura un acabado suave de la superficie y ayuda a lograr resultados de primera clase, particularmente en combinación con los materiales de composite microrrellenos.

Paso 3



Pulido a alto brillo con Astropol HP

Para resultados óptimos mostrando superficies extremadamente suaves y de alto brillo. Además de ser apropiados para materiales convencionales, Astropol HP está recomendado para el súper pulido de composites híbridos y materiales de cerómeros.

Pulido a alto brillo con Astrobrush®

El sistema de pulido Astrobrush produce brillantes resultados sin necesidad de utilizar pasta de pulido, ya que cada filamento actúa como un pequeño instrumento de pulido.



Indicaciones

Pulido a alto brillo de restauraciones realizadas con composite, compómeros, cerámica y cementos de ionómero de vidrio.

Copa pequeña

- Restauraciones anteriores y cervicales
- Superficies oclusales
- Eliminación de manchas próximas a gingiva
- Para utilizar en áreas reducidas

Copas grandes

- Pulido de grandes superficies de restauración en posteriores
- Eliminación de manchas

Punta

- Pulido de fisuras oclusales
- Zonas proximales

Principio de trabajo

El medio abrasivo de carburo de silicio está integrado en las fibras especiales. Aunque las fibras se desgasten, siempre se encuentra medio abrasivo fresco en la superficie. Por ello, los cepillos siempre demuestran un consistente rendimiento de alto pulido. Los resultados deseados se alcanzan de manera más eficaz que con pulidores convencionales.



Astrobrush

Astrobrush complementa este sistema de manera ideal. Estos originales cepillos se utilizan sin necesidad de pasta de pulir, ya que el medio de pulido está integrado en sus especiales filamentos.

Indicaciones	Copa pequeña	Copa grande	Punta
Superficies cóncavas	●		●
Superficies convexas		●	
Interdental	●		●
Oclusal	●	●	●

Copa pequeña



Para restauraciones anteriores y cervicales, superficies oclusales, eliminación de manchas próximas a gingiva así como áreas reducidas.

Copa grande



Para el pulido de grandes superficies en la zona de posteriores y eliminación de manchas.

Puntas



Para el pulido de fisuras oclusales y zonas proximales.

Astropol® y Astrobrush®

Formas de suministro



Astropol

Assortment

12 Astropol F en 4 colores
8 Astropol P en 4 colores
4 Astropol HP en 4 colores

Refill Astropol F

6 Astropol F en un sólo color; disponible en 4 colores

Refill Astropol P

6 Astropol P en un sólo color; disponible en 4 colores

Refill Astropol HP

3 Astropol HP en un sólo color; disponible en 4 colores

Selección de formas

Astropol



Astrobrush

Assortment

5 Astrobrush copa grande
5 Astrobrush copa pequeña
5 Astrobrush puntas

Refill

6 Astrobrush en una sola forma, disponible en 3 formas

Selección de formas

Astrobrush



Referencias bibliográficas: Krejci I, Lutz F, Beretti R: Resin composite polishing. Filling the gaps. Quint. Int. 30: 490-495, 1999

Este material ha sido desarrollado para su aplicación en el campo dental y debe utilizarse según las instrucciones de uso. Ilustraciones y datos no son garantía de propiedades y no constituyen compromiso alguno.
Printed in Switzerland © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
563474/1105/sp/RDV

Ivoclar Vivadent S.A.
Clinical
Emilio Muñoz 15
esquina c/ Albarracín
28037 Madrid
Tel. +34 91 375 78 20
Fax +34 91 375 78 38

Ivoclar Vivadent
Marketing Ltd. Clinical
Calle 134 No. 13-83
Of. 520
Santafé de Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63

Ivoclar Vivadent Clinical
Av. Mazatlán No. 61
Piso 2, Col. Condesa
06170 México D.F.
México
Tel. +52 (55) 5062-1000
Fax +52 (55) 5062-1029

Ivoclar Vivadent Ltda.
Clinical
Rua Maestro João Gomes
de Araújo 50, Salas 92/94
Sao Paulo, CEP 02332-020
Brasil
Tel. +55 11 69 59 89 77
Fax +55 11 69 71 17 50

Ivoclar Vivadent AG
Clinical
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60

ivoclar
vivadent
passion vision innovation