



Opciones de menú

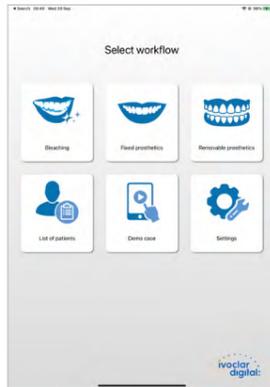

Menú a seleccionar:

- Objetivo del tratamiento:
 - Blanqueamiento
 - Prótesis dental fija
 - Prótesis dental removible
- Lista de pacientes
- Caso demo para pruebas
- Ajustes
 - Idioma
 - Preguntas frecuentes – FAQs
 - Información legal

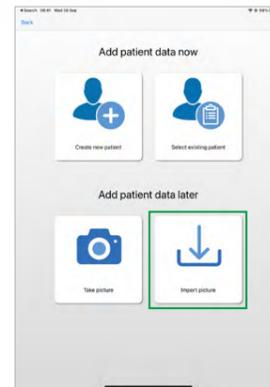

Datos del paciente

...para empezar desde el principio:

- Crear un nuevo paciente
- Abrir un paciente existente


... para agregar más tarde:

- Hacer una foto
- Subir una foto

Subir fotos

- Abrir fotos en la carpeta de fotos

Hacer fotos individuales

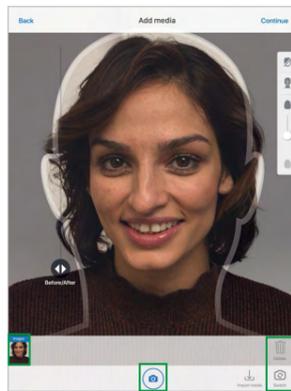

Distancia **ideal** entre el iPad / iPhone y el paciente:


- La cara debe estar alineada con la plantilla de la cabeza
- Se pueden hacer varias fotografías individuales

Nota:

- Utilice la cámara trasera (mayor resolución)
- Asegúrese de tener suficiente brillo. Utilice una fuente de luz brillante desde el frente para proporcionar una iluminación óptima
- La plantilla de la cabeza desaparece tan pronto como se detecta la cara

- Modo silueta activado / desactivado
- Cambiar entre cámara frontal/trasera
- Borrar fotos individuales

Hacer fotos secuenciales (opcional)

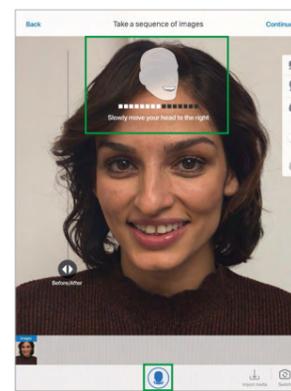


- Las secuencias de imágenes toman imágenes de la cabeza en un movimiento de izquierda a derecha
- La grabación comienza automáticamente tan pronto como se detecta movimiento de la cabeza

Importante:

- Las grabaciones de secuencia solo son necesarias para las importaciones en el sistema dental 3Shape*

- Empezar a grabar una nueva secuencia

Galería de imágenes

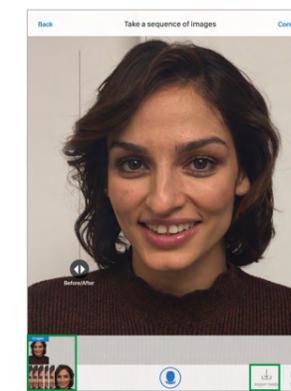

- Descripción general de todas las imágenes individuales y secuencias de imágenes
- Es posible importar imágenes adicionales

- Importar medios (imágenes)

Seleccionar forma de dientes




- "Natural": formas de dientes naturales**
 - "Anteriores" diseñado por el Dr. Jan Hajtő para una estética natural "no perfeccionada"

- Formas de dientes de "prótesis"**
 - Para prótesis removibles o formas dentales estéticas en una disposición ideal
 - Incluye líneas estéticas dentales de Ivoclar Vivadent
 - SR Phonares® II
 - SR Vivodent® S PE / S DCL (16)


- Seleccionar forma de dientes favorita**

Alinear los dientes

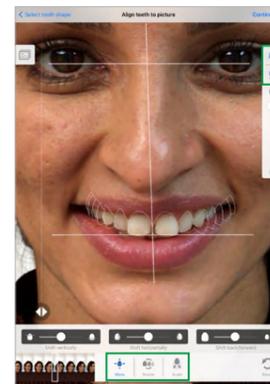

- Mover la posición de los dientes virtuales
 - Izquierda derecha
 - Arriba abajo
 - Siguiente anterior
- Herramienta de rotación para dientes virtuales
- Aumentar / disminuir el arco dentario
- Modo silueta activado / desactivado
- Mostrar / ocultar líneas de referencia faciales
- Reiniciar: borra todas las imágenes, grabaciones y ajustes

Ajustar las dimensiones de los dientes

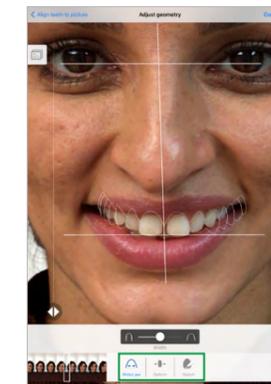

- Ajuste del ancho de la mandíbula "pasillo bucal"
- Ajustar el ancho de los dientes anteriores
- Modificaciones individuales de los dientes virtuales y los tejidos blandos.
- Nota:
 - Use dos dedos para acercar la imagen
- Utilice un dedo o un lápiz de pantalla táctil adecuado para realizar ajustes


* Se requiere el complemento IvoSmile para importar secuencias de imágenes al sistema dental 3Shape

Ajustar el tono (dientes, tejido blando)



- Configuraciones de color y valor para dientes virtuales y tejidos blandos
- Blanqueamiento de dientes mandibulares

Vista anticipada

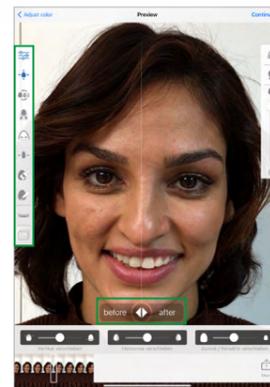

- Vista previa de la nueva sonrisa, antes de la en tiempo real Visualización 3D del paciente
- Los ajustes, como seleccionar diferentes dientes o alterar el color del diente, se pueden realizar directamente en el menú lateral.
- Todos los pasos implementados previamente se pueden revisar directamente a través del menú lateral.

◀▶ Mover el control deslizante de izquierda a derecha para cambiar entre vista antes / después

Modo en directo



- La visualización 3D en tiempo real de la nueva sonrisa se puede mostrar directamente al paciente.


▶ Iniciar la visualización en tiempo real

Guardar proyecto/caso




Seleccione "Guardar" para almacenar el actual caso

- Introduzca los datos del paciente
- Introduzca los detalles del proyecto
- Agregar notas

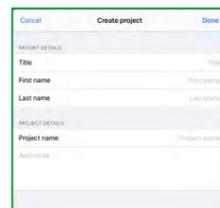

Enviar imagen / captura de pantalla actual

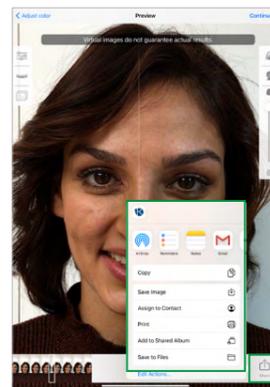

Enviar o guardar captura de pantalla


Nota:

- La imagen se enviará con un descargo de responsabilidad diciendo que la imagen representa una propuesta no vinculante.

Recomendación:


- Cree siempre un proyecto para guardar la visualización y las imágenes actuales.

Exportar un caso clínico

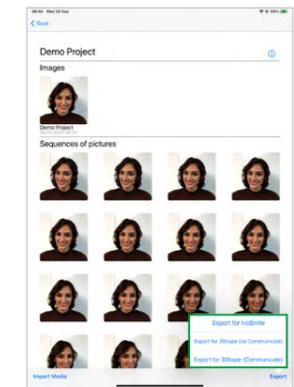


Opciones de exportación para casos clínicos

- Exportar para IvoSmile**
Para reenviar casos a otros usuarios de IvoSmile
- Exportar para 3Shape (sin 3Shape Communicate)**
Para reenviar casos al 3Shape Dental System usando una aplicación para compartir archivos *
- Exportar para 3Shape (con 3Shape Communicate)**
Para reenviar casos al 3Shape Dental System utilizando el servidor 3Shape Communicate

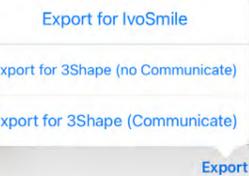


Importar casos desde 3Shape*

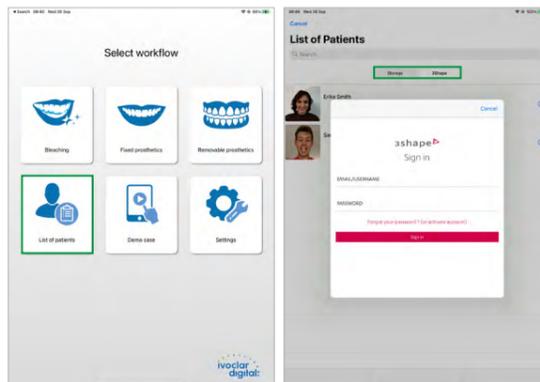

En el menú de inicio "Seleccionar flujo de trabajo" toque en el elemento de menú "Lista de pacientes".

Storage 3Shape

Ajustes

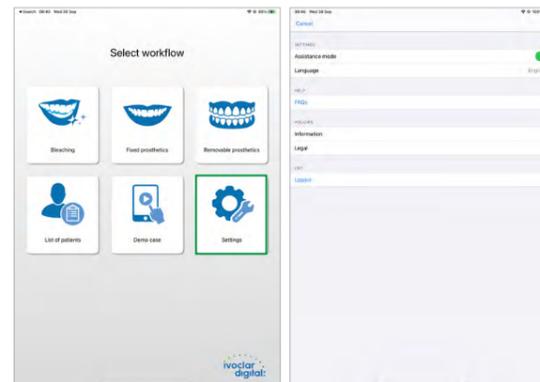

Software de comunicación y consulta para profesionales de la odontología, basado en tecnología de realidad aumentada.

Disponible en la App Store de Apple. Compatible con iPads y iPhones (dispositivos desde 2015 en adelante)



* Se requiere el complemento IvoSmile para importar datos desde 3Shape Dental System