


# Ivomix® – Short Instructions | Kurzanleitung

- 1** Remove from packaging  
Gerät auspacken

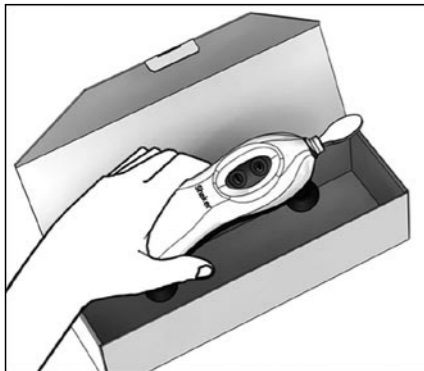


- 2** Mount vibrating plate  
Arbeitsplattform aufstecken




- 3** Wet the suction cups  
Gummifüße mit Wasser benetzen



- 4** Place on a smooth surface and  
apply pressure  
Saugfüße auf glatte Arbeitsfläche  
anpressen

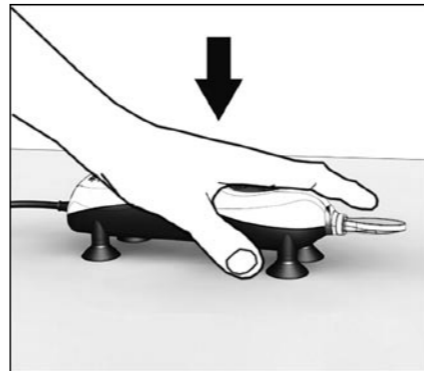

- 5** Connect to power supply  
Netzanschluss herstellen

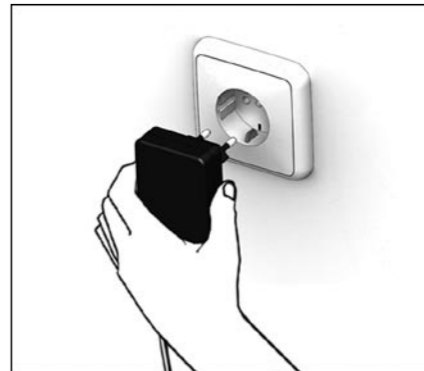

- 6** Switch appliance on and off  
Gerät ein- und ausschalten

