

VivaStyle® Paint On Plus



Der professionelle Weg zum Weiss

Fragen und Antworten

zum Aufhellen der Zähne

VivaStyle® Paint On Plus

Wie wünschen Sie sich Ihr Lächeln?



So...



...oder so?

Lächeln verbindet.

Schöne gesunde
Zähne ein Leben lang.



Der professionelle Weg zum Weiss

Stört es Sie, dass Ihre Zähne nicht so hell aussehen, wie Sie es sich wünschen?
Schöne, weisse Zähne für ein strahlendes, gewinnendes Lächeln:

Eine professionelle Zahnaufhellung mit VivaStyle Paint On Plus macht es möglich.

Wie funktioniert das?

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Zahnaufhellung mit VivaStyle Paint On Plus.

Wie kann ich die Zähne aufhellen?

Zähneputzen allein kann bei lästigen Verfärbungen häufig nicht genug ausrichten.

Heute gibt es sehr wirksame Massnahmen. Eine mögliche Methode ist die von Ihrem Zahnarztteam empfohlene, professionelle Zahnaufhellung mit dem Lacksystem VivaStyle Paint On Plus. Sie beruht auf den Erkenntnissen der modernen Zahnheilkunde.



VivaStyle® Paint On Plus

Warum können sich meine Zähne verfärben?



Bestimmte Nahrungsmittel und Getränke, Medikamente und Erkrankungen sowie Rauchen können zu Verfärbungen der Zähne führen. Auch mit zunehmendem Alter werden sie meistens dunkler.

Zahnaufhellung mit einem Lacksystem – wie funktioniert das?

VivaStyle Paint On Plus wird mit einem Pinsel auf die Zähne aufgetragen. Der bewährte Wirkstoff Wasserstoffperoxid setzt Sauerstoff frei, der die Zahnverfärbungen schonend aufhellt.


Der getrocknete, mattweisse Lack bleibt einige Minuten auf den Zähnen und wird dann mit der Zahnbürste entfernt.

Kann ich die Behandlung auch zu Hause durchführen?

Ja. Es ist allerdings unbedingt erforderlich, dass Ihr Zahnarzt einen Befund erstellt und den Behandlungsplan mit Ihnen bespricht. Danach führen Sie die Anwendung bis zur Kontrolluntersuchung entsprechend der Anleitung Ihres Praxisteamts bequem zu Hause durch.



**Der Lack setzt Sauerstoff (O₂) frei.
Dieser hellt Verfärbungen auf.**

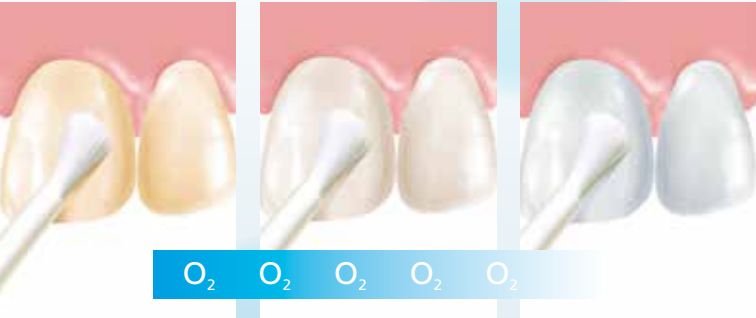

Kann jeder den Lack anwenden?

Nein. Bestimmte Personen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, schwangere Frauen und stillende Mütter sind von der Behandlung ausgeschlossen. Ihr Zahnarzt wird Ihnen sagen, ob die Zahnaufhellung für Sie in Frage kommt.




VivaStyle® Paint On Plus



Schritt für Schritt

Der professionelle Weg zum Weiss

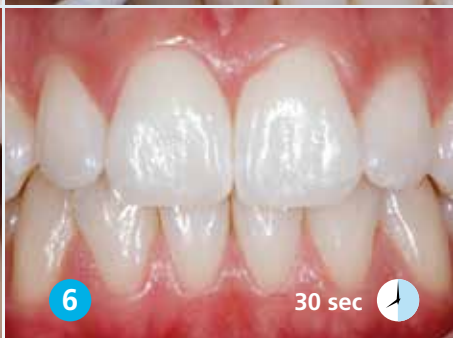

VivaStyle® Paint On Plus

Ist die Zahnaufhellung sicher?

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Wissenschaft handelt es sich um ein schonendes Verfahren, in dem weder Zähne noch vorhandene Füllungen oder die Mundschleimhaut beeinträchtigt werden.



Gibt es spezielle Tipps zur richtigen Anwendung?

Ja. Auf sauberen, trockenen Zähnen haftet der Lack besser und kann damit seine Wirkung vollständig entfalten.

Muss ich mit Nebenwirkungen rechnen?

Gerät etwas Lack auf die Schleimhaut, kann vorübergehend ein Kältegefühl auftreten. Manchmal kann es während der Anwendung des Lackes kurzzeitig zu einer Empfindlichkeit der Zähne oder Reizungen der Schleimhaut kommen.

Kann ich diese Nebeneffekte vermeiden oder reduzieren?

Ja, während der Behandlungstage sollten Sie Zitrusfrüchte sowie säurehaltige Getränke meiden. In Ihrer Zahnarztpraxis erhalten Sie die entsprechenden Informationen darüber, was Sie bei der Behandlung unbedingt beachten sollten.

Wie oft kann ich den Lack anwenden?

Ein- oder zweimal täglich entsprechend der Empfehlung Ihres Zahnarztes. Die Anwendung nimmt jeweils zehn Minuten Ihrer Zeit in Anspruch.



VivaStyle® Paint On Plus

Wie lange dauert die Behandlung?

Das hängt von der Ursache und dem Ausmass der Verfärbungen ab. In vielen Fällen ist schon nach wenigen Anwendungen eine Aufhellung zu erkennen.

Durch Nahrungsmittel verursachte Verfärbungen sind meistens nach schon 7 oder 14 Tagen aufgehellt. Sind die Verfärbungen dagegen durch Medikamente oder eine Erkrankung bedingt, kann die Behandlung mehrere Monate dauern. In diesem Fall kann Sie Ihr Zahnarzt über eine andere Methode beraten.

Werden die Zähne bei jedem Menschen gleich hell?

Nein, das ist ganz individuell. Die ursprüngliche, natürliche Zahnfarbe und auch die Ursache der Verfärbungen spielen eine Rolle.

Wie lange wirkt die Zahnaufhellung?

Das hängt von Ihrem Lebensstil ab: Der Behandlungserfolg kann sich über ein paar Monate bis zu ein paar Jahren erstrecken.



Ernährungsgewohnheiten, Rauchen, Alter und Zahnpflege beeinflussen die Dauer der Wirkung ganz entscheidend.

Zum Beispiel kann häufiger Genuss von Kaffee, Rotwein oder Tee sowie Rauchen die Zähne schnell wieder verdunkeln.





Wie erhalte ich die Zähne möglichst lange weiss?

Gute Mundhygiene ist die Basis für langfristig schöne Zähne. Die regelmässige, professionelle Zahnreinigung in der Praxis stützt Ihr Anliegen. Sollten die Zähne nach einiger Zeit wieder nachdunkeln, können Sie die Behandlung mit VivaStyle Paint On Plus wiederholen.



Werden auch Restaurationen aufgehellt?

Nein. Die Zahnaufhellung beeinflusst nur die natürlichen Zähne. Ihr Zahnarzt berät Sie gerne, ob das Verfahren für Ihre Zähne in Frage kommt, da Füllungen und Kronen im sichtbaren Bereich gegebenenfalls zu erneuern sind.

Gibt es Füllungen, die so weiss sind, dass sie sich nicht von aufgehellten Zähnen abheben?

Ja. Von Ivoclar Vivadent gibt es Produkte, die sich nicht von aufgehellten, natürlichen Nachbarzähnen abheben. Fragen Sie Ihren Zahnarzt danach.

VivaStyle® Paint On Plus

Ist die Absprache mit dem Zahnarzt unerlässlich?

Ja. Ihr Zahnarzt kann Ihnen ein wirksames Produkt wie VivaStyle Paint On Plus empfehlen. Aufgrund seines Befundes erhalten Sie das für Sie passende Produkt. Die Beratung durch das Praxisteam hilft, Nebenwirkungen zu vermeiden und die Behandlung erfolgreich durchzuführen. Sie erhalten Informationen über professionelle Möglichkeiten, die Zähne länger weiss zu halten.



Fragen Sie auch danach, was Sie zu Hause tun können.

Gönnen Sie sich ein strahlendes Lächeln. Ihr Praxisteam sagt Ihnen, wie's geht.

Praxisstempel

662874/de/2013-06-06

Hersteller und Vertrieb:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +432 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49(0)7961 / 889-0
Fax +49(0)7961 / 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation