


Gross oder klein

Skyce wird in der Farbe „kristall“ mit Durchmessern von 1.9 Millimetern und 2.4 Millimetern angeboten.

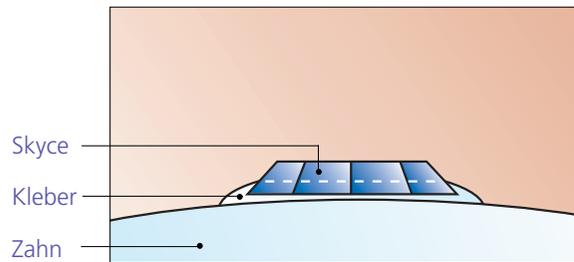


Praxisstempel

Hersteller und Vertrieb:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
www.ivoclarvivadent.de
e-Mail: info@ivoclarvivadent.de

560217/1007/d/RDV

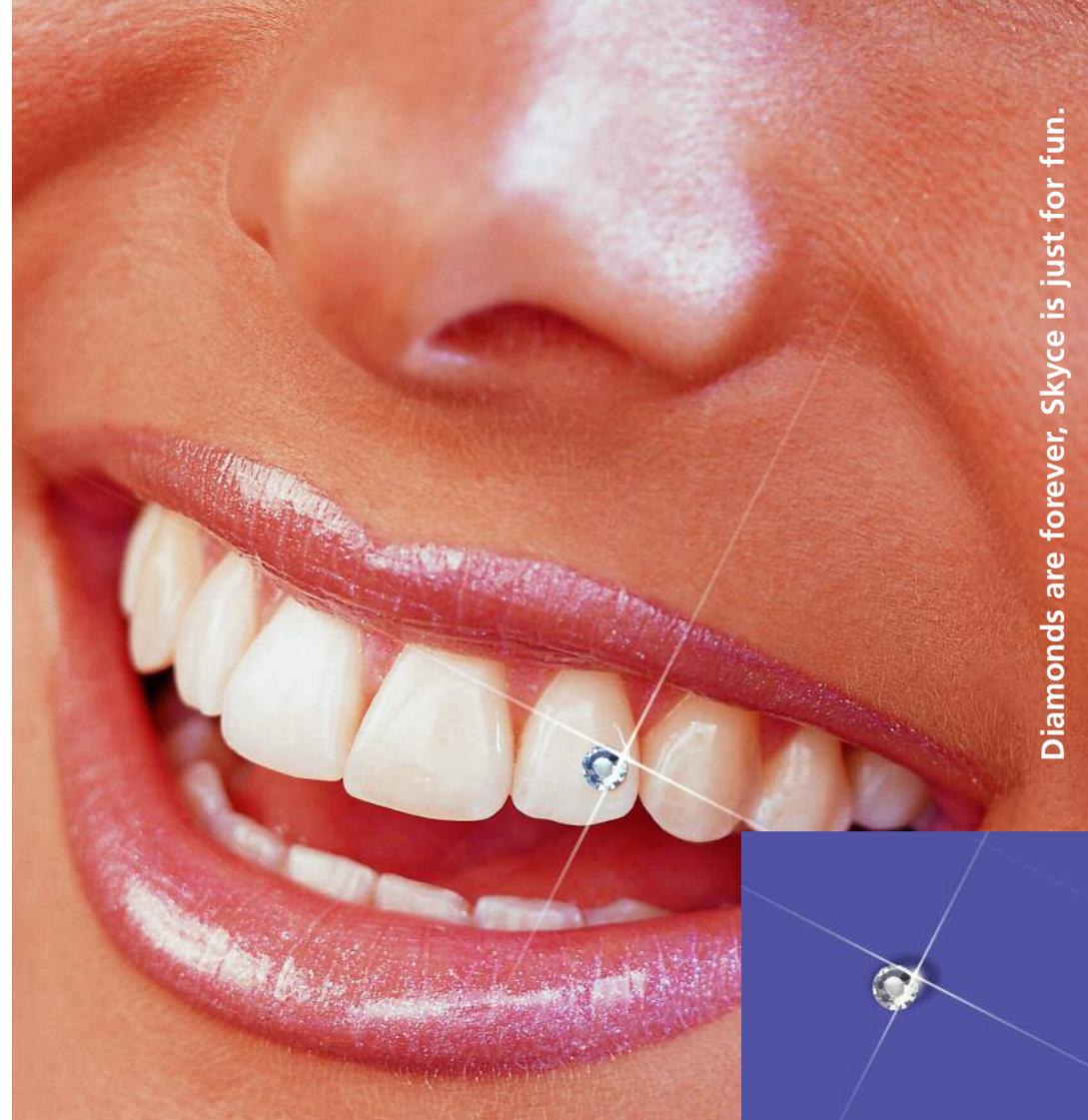

Diamonds are forever, Skyce is just for fun.

Ein brillantes Lächeln.
Mit Skyce® von Ivoclar Vivadent.

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation

Schmuckes Lächeln, kristallines Funkeln



Skyce von Ivoclar Vivadent ist ein Zahnschmuckstein aus Kristallglas, der auf Ihren Zahn einfach aufgeklebt wird. Skyce gibt es in zwei verschiedenen Größen in der Farbe kristall. Ihr Zahnarzt berät Sie gerne, welcher Stein auf welchen Zahn am besten passt.

Cooler Styling, heiler Zahn

Das Aufkleben von Skyce hat keinen Einfluss auf die Gesundheit Ihres Zahnes. Das Prinzip ist dasselbe, wie beim Befestigen von sogenannten Brackets beim Kieferorthopäden. Und das ist altbewährt. Ihr Zahn wird weder angeschliffen, und schon

gar nicht „angebohrt“. Wie's genau geht, lesen Sie im nächsten Absatz.

Oberfläche säubern, kleben mit blauem Licht

Erst wird ein kleiner Fleck auf Ihrem Zahnschmelz von Ihrem Zahnarzt sorgfältigst gereinigt, um eine saubere und trockene Klebefläche zu erhalten. Dann wird eine spezielle Flüssigkeit aufgetragen, um die Zahnoberfläche mikroskopisch rau zu machen, damit der Kleber an dieser Stelle haften kann. Danach wird das Steinchen aufgeklebt, und der Kleber mit einem speziellen Licht ausgehärtet. Manchmal müssen noch

geringfügige Klebeüberschüsse entfernt werden, aber auch diese Prozedur ist, wie der ganze Rest der Behandlung, völlig schmerzfrei. Und der Schmuckstein lässt sich auf Wunsch von Ihrem Zahnarzt auch ganz leicht wieder entfernen.

Skyce® von Ivoclar Vivadent: zaubert Brillanz in Ihr Lächeln.

