

# Programat<sup>®</sup> / IvoBase<sup>®</sup> Injector

## Anleitung für Softwareupdate via Web-Updater:

Unterstützte Geräte:	Was benötigen Sie dazu?
Programat P300 & P300/G2 Programat P500 & P500/G2 Programat P700 & P700/G2 Programat EP 3000 & EP 3000/G2 Programat EP 5000 & EP 5000/G2 Programat CS Programat S1 Programat S1 1600 IvoBase Injector	- PC mit Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1 oder 10) - USB-Downloadkabel (ist im Lieferumfang des Programat enthalten) - <b>Administrationsrechte auf Ihrem PC</b> (Andernfalls wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen EDV Administrator) - Ab Windows 8 den Web-Updater mittels rechter Maustaste und „Als Administrator ausführen“ starten


### Herzliche Gratulation:

Sie haben sich dazu entschieden, ein Software-Update mittels Web-Updater durchzuführen. Die aktuelle Software für Ihren Programat oder IvoBase Injector finden Sie unter [www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter](http://www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter).

Die nachfolgende Anleitung informiert Sie, wie Sie diese einfache Anwendung durchführen können.

### Vorgehensweise:

Öffnen Sie im Downloadcenter das gewünschte Softwareupdate. Nach dem Doppelklick auf die „exe“ Datei und im Anschluss auf den Button „Ausführen“, öffnet sich automatisch ein Fenster zur Sprachauswahl. Bitte wählen Sie hier ihre Sprache.

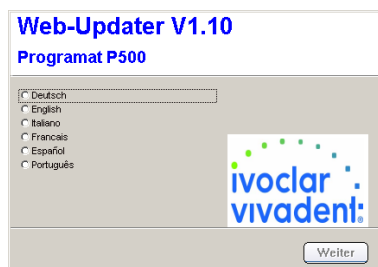

Folgen Sie den weiteren Anweisungen. Das Softwareupdate ist mit wenigen Schritten erledigt:



**Wichtige Information:**



Bitte beachten Sie, dass abhängig von der installierten Software Version alle Brenn- und Pressprogramme (Ivoclar Vivadent- und individuelle Programme) beim Update auf Werkseinstellung zurückgestellt werden. Daher empfehlen wir alle individuellen Einstellungen von Programmen vorher zu notieren oder auf USB-Stick oder PC (via PrograBase 2 Software) zur speichern.



**Besonderheit beim Programat P300:** Wird bei einem Programat P300 der ersten Generation die Programat P300/G2 Software aufgespielt, dann werden alle individuellen Programme auf Werkseinstellung zurück gestellt. Wir empfehlen die Programmparameter daher vorher händisch zu notieren!