

# Monobond® Plus

Der Universalprimer



Einfach  
**universell**

# Universell einsetzbar

Die korrekte Vorbehandlung der Klebeflächen einer Restauration ist im Rahmen der adhäsiven Befestigung ein wesentlicher Bestandteil der Prozesskette. Mit Monobond® Plus steht ein Universalprimer zur Konditionierung nahezu aller Restaurationsmaterialien zur Verfügung.


## Ein Primer für unterschiedlichste Materialien

Monobond Plus zeichnet sich durch die innovative Kombination von drei verschiedenen funktionellen Haftmonomeren aus: Phosphorsäuremethacrylat, Silanmethacrylat und Sulfidmethacrylat. So erzielt der Universalprimer auf Zirkonoxid, Glaskeramik und Metalllegierungen eine vergleichbar beständige Haftung wie Haftvermittler für Einzelmaterialien.



## Zughaftung von Multilink® Automix und Monobond® Plus auf verschiedenen Materialien

[Zughaftwerte nach 167 Tagen Wasserlagerung und 37'500 Thermolastwechseln]

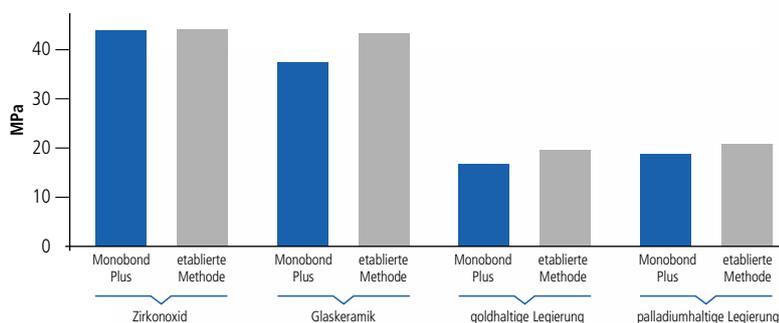




### Überzeugende Leistung

Auch im Vergleich mit sogenannten Universaladhäsiven überzeugt Monobond Plus mit ausgewogener und beständiger Haftung an Zirkonoxid und Glaskeramiken.

### Beständigkeit des Klebeverbundes zu Zirkonoxid und Lithium-Disilikat bei Verwendung verschiedener Primer / Klebersysteme

[Zughaftwerte nach 150 Tagen Wasserlagerung und 37'500 Thermolastwechseln]

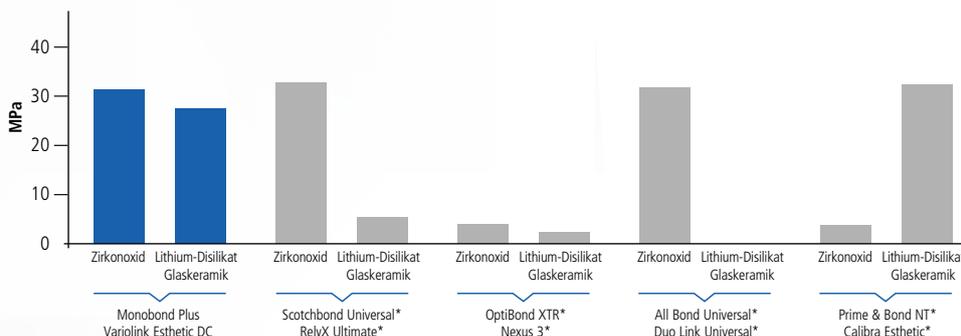

\* Diese Marken sind keine eingetragenen Marken der Ivoclar Vivadent AG.  
Quelle: Elsayed et al.; J Adhes Dent 2017; 19: 221-228

# Einfache Applikation

Nach der materialspezifischen Vorbehandlung der Klebefläche der Restauration durch Abstrahlen oder Ätzen wird Monobond Plus unabhängig vom Restaurationsmaterial immer auf dieselbe Weise angewendet: Auftragen, 60 Sekunden einwirken lassen, Überschüsse verblasen – fertig!



Mit Monobond Plus ist auch die Lagerhaltung einfach und effizient: statt diverser, teilweise temperatursensibler Spezialprimer nur noch ein Raumtemperatur-stabiler Universalprimer.

### Lieferform

Refill  
1 Flasche Monobond Plus 5g, 626221AN



Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 8890  
Fax +49 7961 6326  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

740498/de/2019-10

  
**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation